



## ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL MISSNER.

**Descrição:** Produto correlato médico hospitalar, classe I (conforme classificação da ANVISA). É apresentado na forma de rolo cortado e rebobinado em carretel plástico, encapado com capa plástica devidamente identificada e embalada em caixa de papelão também identificada. Possui as bordas serrilhadas para facilitar o rasgo manual, e uma camada altamente impermeabilizante na parte superior, evitando que água e contaminantes externos penetrem no ferimento. **Composição:** Fita adesiva composta por tecido 100% algodão, tratado com resinas acrílicas, adesivo à base de óxido de zinco, borracha natural, lanolina e resinas. **Indicação de uso:** Fixação de curativos secundários, sondas, drenos, dispositivos de infusão intravenosa, cateteres, e outros procedimentos clínicos que exijam fixação. **Instruções de uso:** Definir o tamanho de esparadrapo a ser utilizado conforme cada ferida / curativo primário. Rasgue ou corte o esparadrapo e fixe-o sobre a pele e/ou curativo primário. Faça pressão leve a moderada com os dedos sobre o esparadrapo para obter melhor fixação do produto. **Precauções:** A durabilidade deste produto condiciona a manter em local limpo, seco e ao abrigo da luz. Produto não estéril. Destruir após o uso. **Advertências:** O produto contém látex natural. Em caso de irritação, suspenda o uso e procure um profissional da saúde. **Cores:** Branco, bege, rosa e marrom. **Validade:** 2 anos a partir da data de fabricação. **Cadastro Anvisa Nº:** 80003300017. **Embalagem:** O produto se apresenta nas dimensões e nas quantidades conforme tabela abaixo:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	EAN
PA. 0750	Esparadrapo Impermeável Branco Missner 10cm x 4,5m	24 unidades	7896544910102
PA. 0235	Esparadrapo Impermeável Branco Missner 5,0cm x 4,5m	96 unidades	7896544910058
PA. 0233	Esparadrapo Impermeável Branco Missner 2,5cm x 4,5m	96 unidades	7896544925458
PA. 0231	Esparadrapo Impermeável Branco Missner 1,2cm x 4,5m	144 unidades	7896544925014
PA. 0234	Esparadrapo Impermeável Branco Missner 2,5cm x 90cm	204 unidades	7896544900073
PA. 0014	Esparadrapo Impermeável Bege Missner 10cm x 4,5m	24 unidades	7896544900318
PA. 0017	Esparadrapo Impermeável Bege Missner 5cm x 4,5m	96 unidades	7896544900325
PA. 0015	Esparadrapo Impermeável Bege Missner 2,5cm x 4,5m	96 unidades	7896544900332
PA. 0013	Esparadrapo Impermeável Bege Missner 1,2cm x 4,5m	144 unidades	7896544900349
PA. 0016	Esparadrapo Impermeável Bege Missner 2,5cm x 90cm	204 unidades	7896544900356
PA. 0825	Esparadrapo Impermeável Rosa Missner 10cm x 4,5m	24 unidades	7896544902909
PA. 0812	Esparadrapo Impermeável Rosa Missner 2,5cm x 4,5m	96 unidades	7896544902916
PA. 1280	Esparadrapo Impermeável Marrom Missner 2,5cm x 4,5m	96 unidades	7896544902541