

**Produto:** Hidrocoloide Plus com Espuma M-TEC



**Descrição:** produto correlato médico hospitalar, classe III (conforme classificação da ANVISA). É apresentado na forma de curativos em placas, estéril por radiação gama.

**O Curativo Hidrocoloide Plus com Espuma M-TEC é composto por uma camada de hidrocolóide a base de carboximetilcelulose, uma camada absorvente de espuma de poliuretano e outra película fina impermeável de poliuretano.**

**Indicação:** Os Curativos Hidrocoloides Plus com Espuma M-TEC são indicados para: úlceras dérmicas de espessura parcial e total; úlceras de pressão, de edema e diabéticas; queimaduras (primeiro e segundo grau); áreas doadoras de pele e enxertos de pele; feridas superficiais/escoriações leves; proteção de pele frágil ou áreas expostas à fricção/atrito; com cotovelos; calcanhares ou área sacral; curativos de ostomia para proteger a pele do efluente estomacal; curativos pós-operatórios para proteção da linha de sutura e assaduras de bebês.

**Registro ANVISA N°:** 80003300028.

**Composição:** composto por uma camada de carboximetilcelulose (CMC), dióxido de silício coloidal, uma camada adesiva de borracha sintética a base de Estireno-Isopropeno (SIS), poliisopreno, vaselina, antioxidante, poliisobutelino e resina hidrocarbônica, uma camada absorvente de espuma de polietileno, protegido por um papel siliconizado. **ISENTO DE LÁTEX E GELATINA.**

**Condições de Armazenamento e Conservação:** Manter em local limpo e ao abrigo da luz.

**Precauções:** A esterilidade do curativo é assegurada enquanto a embalagem estiver íntegra.

**O tratamento de qualquer úlcera cutânea deve fazer parte de um plano bem definido para o manejo da úlcera e sob a supervisão de um profissional de saúde especializado.**

**Ao usar os curativos hidrocoloides, inicialmente a ferida parecerá maior e mais profunda à medida que o tecido desnecessário é removido. Esse aumento deve ser acompanhado pela limpeza do tecido desnecessário. Este aumento e limpeza do tecido desnecessário deve**

**apresentar uma melhor aparência da ferida. Se a ferida continuar aumentando após as primeiras trocas de curativos, consulte um profissional de saúde.**

**Observe a ferida em busca de sinais de infecção. Se ocorrer infecção, cujos sinais podem ser: febre, aumento de dor, vermelhidão, sangramento, inchaço ou um odor incomum de secreção, consulte um profissional de saúde. Curativos hidrocoloides podem ser usados em feridas infectadas somente sob os cuidados de um profissional de saúde.**

**Raramente, pode ocorrer irritação (vermelhidão, inflamação), maceração (clareamento da pele) ou hipergranulação (formação excessiva de tecido) em algumas feridas com a utilização de curativos hidrocoloide. Se isso ocorrer, consulte um profissional de saúde.**

**Advertências: Produto de uso único. Destruir após o uso. Os Curativos Hidrocoloides Plus com Espuma M-TEC não são indicados para uso em indivíduos com uma sensibilidade conhecida aos hidrocoloides. Não reutilize o curativo, pois pode comprometer a esterilidade e/ou o desempenho do curativo. Para uso sob orientação de um profissional de saúde. Somente para uso externo. Em caso de irritação, descontinue o uso e procure orientação médica.**

**Instruções de Uso:**

- 1. Irrigar o local da ferida de acordo com o protocolo padrão, se necessário, e secar a pele circundante antes de aplicar o curativo.**
- 2. Selecione um tamanho do Curativo Hidrocoloide com Espuma que se estende além do local da ferida em pelo menos 2cm.**
- 3. Retire o papel de proteção do curativo.**
- 4. Aplique o curativo sobre a ferida, com uma leve pressão sobre a pele adjacente intacta, isso ajudará a garantir a adesão do curativo à pele do paciente.**

**Troca e Remoção do Curativo:**

- 1. O Curativo Hidrocoloide com Espuma pode permanecer no local da ferida por até 5 dias, dependendo da condição do paciente e do nível de exsudado. Se houver desprendimento voluntário do curativo ou necessidade de uma boa prática de cuidado antes dos 5 dias, o curativo deve ser removido totalmente e trocado.**
- 2. Para remover o curativo, pressione a pele com uma mão e levante cuidadosamente a borda do penso com a outra mão. Se o curativo não for facilmente removido, umedeça com solução salina estéril antes da remoção. Descarte de acordo com os procedimentos e diretrizes locais.**
- 3. Se necessário, limpe o local da ferida antes da aplicação de um novo curativo.**

**Validade:** 05 anos a partir da data de fabricação.

**Apresentação / Embalagem:** O produto se apresenta nas dimensões e embalagens conforme tabela abaixo:

| DESCRIÇÃO DO ITEM                                                  | DIMENSÃO     | EMBALAGEM PRIMÁRIA  | EMBALAGEM SECUNDÁRIA     | EMBALAGEM DE TRANSPORTE |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>CURATIVO HIDROCOLOIDE C/ ESPUMA M-TEC 10CM X 10CM CX C/10UN</b> | 10 cm x 10cm | Envoltório de papel | Cartucho de papel cartão | Caixa de papelão        |

**Apresentação comercial:**

| Cód. Venda      | Descrição do item                                           | Curativos/Cartucho | Cód. Barras EAN 13 | Cód. Barras EAN 13 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                 |                                                             |                    | Envoltório         | Cartucho           |
| <b>PA. 1397</b> | Curativo Hidrocoloide C/ Espuma M-TEC 10cm X 10cm cx C/10un | 10                 | 7896544901728      | 7896544901735      |

|             |                |            |                |
|-------------|----------------|------------|----------------|
| Elaboração: | Data: __/__/__ | Aprovação: | Data: __/__/__ |
|             |                |            |                |