

# Missner

Um toque de cuidado

## SPRAY PELÍCULA PROTETORA DERMA PROTECT

**Modo de uso:** 1. A pele deve estar limpa e seca antes de aplicar o produto. 2. Evite passar cremes ou óleos no local onde for aplicar a película, isso impedirá o Spray Película Protetora - Derma Protect de protegê-la.

3. Borrife a uma distância de 10 centímetros da pele. 4. Faça o mesmo na região ao lado e assim por diante, até proteger toda a área desejada. 5. Ao aplicar em área de dobras, como entre as nádegas, mantenha as partes separadas até o produto secar para depois retorná-las à posição inicial. 6. Aguarde secar totalmente para colocar a fralda ou colocar um curativo, fitas ou bolsa de ostomia.



### SPRAY PELÍCULA PROTETORA DERMA PROTECT

**Descrição:** Produto correlato médico hospitalar, classe II (conforme classificação da ANVISA). É apresentado na forma de spray, não estéril.

**Indicações:** Produto indicado para utilizar em pacientes adultos, crianças e bebês com idade superior a 1 mês que estejam com lesões de pele decorrentes de incontinências urinárias e/ou fecais, sucros digestivos (ostomias), fricção, cisalhamento e agressões de adesivos devido trocas constantes de curativos.

**Composição:** Hexametildisiloxano, trimetilsiloxilicato, ciclopenta-siloxano, dimeticone, polydimethylsiloxane.

**Condições de Armazenamento e Conservação:** Manter o produto ao abrigo da luz, umidade e em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C).

**Precauções:** O uso deve ser indicado e acompanhado por um profissional habilitado. Em caso de irritação suspender o uso. Pode causar irritação significativa nos olhos. Pode causar irritação nasal e nas membranas da mucosa. Não ingerir, pode causar náuseas, vômito, irritação gastrointestinal. Não irritante para pele.

**Contraindicações:** Está contraindicado para pacientes que apresentam alergia a algum componente da fórmula.

**Apresentações:** Um frasco contendo 28ml do produto.

**Validade:** 2 anos a partir da data de fabricação.

**Cadastro Anvisa N°:** 80003309008

**Embalagem:** O produto pode ser vendido nas seguintes versões conforme tabela abaixo:

CÓDIGO

PA. 1336

PA. 0944

DESCRIÇÃO

Spray Película Protetora - Derma Protect 28ml

Spray Película Protetora - Derma Protect 28ml ( Display 6 un )

APRESENTAÇÃO

Caixa 20 unidades

Caixa 12 unidades

EAN

7896544902787

7896544926547