

Especificação Técnica de Produto

Produto: Curativo Filme Transparente Rolo

Curativo Filme Transparente Rolo MTEC consiste em um filme de poliuretano não estéril, coberto por um adesivo hipoalergênico transparente.

Pode ser usado na prevenção de infecções e proteção de tatuagens recentes.

O produto é permeável a vapores, permitindo trocas gasosas e é impermeável a água e bactérias, atuando como barreira de proteção para a pele.

- Super fino e transparente.
- Fixação de Curativos Primários ou de baixa aderência
- Fixação de cateteres e drenos
- Fixação de Bolsas de perna e dispositivos de estoma
- Reduz riscos de infecção, pois o filme de poliuretano é à prova d'água, à prova de bactérias e à prova de vírus.
- Transparente: possibilita a visualização do local da punção do IV.
- Curativo respirável, evitando a maceração da pele.
- Adesivo sensível à pressão hipoalergênico, com boas propriedades de adesão e não deixa resíduos na remoção.
- O curativo possui sistema de aplicação estilo moldura para facilitar o manuseio.
- Macio e adaptável

Composição: Composto por uma película de poliuretano (PU) transparente com uma camada adesiva acrílica hipoalergênica, protegido por um papel siliconizado. Possui um papel na parte superior que permite a fácil aplicação do filme transparente. Isento de látex.

Indicação: Fixação e cobertura de curativos primários; Cobertura de suturas; Fixação de tubos, drenos e bolsas de perna; Proteção de proeminências ósseas (calcâneo, cotovelo, joelho, região sacra, trocanteriana); Cobertura protetora da pele; Proteção de tatuagens (usar somente depois do fim da fase exsudativa).

Precauções, Advertências e Modo de uso: Não reutilize o curativo. Não ingerir e manter afastado de crianças e animais. Para uso sob orientação de um profissional de saúde. Somente para uso externo. Em caso de irritação, descontinue o uso e procure orientação médica.

Condições de Armazenamento e Conservação: Manter em local limpo e ao abrigo da luz. Manter em temperatura entre 0°C e 40°C.


Cadastro Anvisa N°: 80003300030

Validade: 05 anos.

Instruções de Uso:

- 1) A pele deve estar limpa e seca;
- 2) Cortar o Filme Transparente no tamanho desejado;
- 3) Destacar uma das laterais do papel protetor do adesivo e aplicar sobre o local/pele;
- 4) Remover a outra lateral do papel de proteção do adesivo e posicionar sobre o local/pele;
- 5) Pressionar gentilmente as bordas para fixação e a parte central, massageando sobre o papel superior (quadriculado);
- 6) Remova o papel superior

Como aplicar o curativo

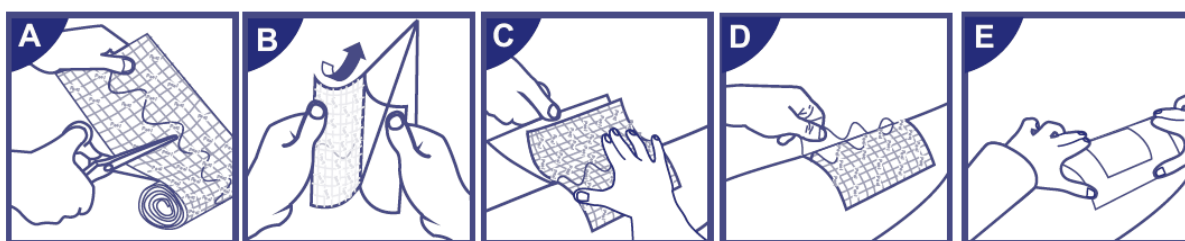

Características da Qualidade:

Características	Métodos	Valores
Adesão (180°) (N/25mm)	05-011	8±2
MVTR (g/m² / 24h)	05-050	800 - 900

Apresentações / Embalagem: O produto se apresenta nas dimensões e nas quantidades conforme tabela abaixo:

Cód. Venda	Dimensões	Curativos / Cartucho	Cartuchos / CX Papelão	Cód. Barras EAN 13 Cartucho
PA.1415	10cm x 10m	1	1	7896544902725
PA.1482	15cm x 10m	1	1	7896544926523

Elaboração:	Data: __/__/__	Aprovação:	Data: __/__/__
_____		_____	