


Instruções de Uso: 1. Abrir o envelope individual de forma asséptica e retirar a janela de papel central do curativo; 2. Em caso de fixação de uma cânula, retirar as tiras de fixação e fixar em abas da cânula de ambos os lados; 3. Retirar a aba maior, expondo a superfície adesiva; em seguida, centralizar cuidadosamente a área transparente do curativo sobre o local de aplicação, para que a fenestral em forma de U fixe o cateter ou a cânula e o outro lado do curativo cubra o suporte de plástico da cânula/cateter; 4. Retirar a aba menor da região adesiva do curativo, em seguida, retirar lentamente a moldura de papel ao mesmo tempo que alisa as laterais; 5. Em caso de fixação de um cateter, retirar as tiras de fixação da película de proteção e colocar sobre o curativo, seguindo o protocolo local; 6. Registrar os dados do paciente na tira colorida (se existente).

Como aplicar o curativo 6,5cm x 70cm



Como aplicar o curativo 10cm x 12cm

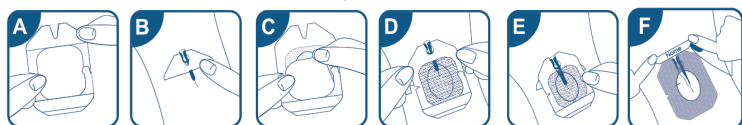

CURATIVO FILME PU FIXAÇÃO DE CATETER IV M-TEC.

Descrição: Super fino e transparente. Macio e adaptável. Com 2 tiras adicionais de não tecido para maximizar a fixação do cateter, identificação do paciente e data da aplicação. Fenestral em forma de U. Curativo respirável, evitando a maceração da pele. Adesivo sensível à pressão, hipoalergênico, não deixa resíduos na remoção, reduz riscos de infecção.

Composição: Composto por uma película de poliuretano (PU) transparente com uma camada adesiva acrílica hipoalergênica, à prova d'água, à prova de bactérias e à prova de vírus. Na parte externa possui uma camada de papel siliconizado que atua como um sistema de fácil aplicação do filme (retirado assim que o curativo é aplicado). Possui borda de não tecido de viscose. Isento de látex. Estéril.

Indicação de uso: Para fixação de dispositivos intravenosos: cateter para hemodiálise, acesso venoso, acesso central, cateter peridural, cateter diálise

Precauções: Não reutilize o curativo, pois pode comprometer a esterilidade e/ou o desempenho do curativo. Não ingerir. Manter afastado de crianças e animais.

Advertências: Para uso sob orientação de um profissional de saúde. Somente para uso externo. Em caso de irritação, descontinue o uso e procure orientação médica.

Validade: 5 anos partir da data de fabricação.

Cadastro Anvisa Nº: 80003300031

Embalagem: O produto se apresenta nas dimensões e nas quantidades conforme tabela abaixo:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	EAN
PA. 1416	Curativo Filme PU fixação de cateter M-Tec 6,5cm x 70cm	50 unidades	7896544902756
PA. 1417	Curativo Filme PU fixação de cateter M-Tec 10cm x 12cm	50 unidades	7896544902763