

Produto: Curativo de Fixação IV M-TEC



Descrição: Curativo de filme de poliuretano (PU) transparente com sistema de moldura para facilitar a aplicação do curativo e adesivo hipoalergênico. Estéril.

- Super fino e transparente.
- Com 2 tiras adicionais de não tecido para maximizar a fixação e a segurança do dispositivo IV.
- Com tira de não tecido (bege) para identificação do paciente e data de aplicação.
- Reduz riscos de infecção, pois o filme de poliuretano é à prova d'água, à prova de bactérias e à prova de vírus.
- Transparente: possibilita a visualização do local da punção do IV.
- Fenestra em forma de U para facilitar a fixação de cateteres e cânulas.
- Curativo respirável, evitando a maceração da pele.
- Adesivo sensível à pressão hipoalergênico, com boas propriedades de adesão e não deixa resíduos na remoção.
- O curativo possui sistema de aplicação estilo moldura para facilitar o manuseio.
- Macio e adaptável.

Indicação: Os Curativos de Fixação IV M-TEC são indicados para fixação de dispositivos intravenosos: cateter para hemodiálise, acesso venoso, acesso central, cateter peridural, cateter diálise.

Registro ANVISA N°: 80003300031.

Composição: Composto por uma película de poliuretano (PU) transparente com uma camada adesiva acrílica hipoalergênica, protegidos por um papel siliconizado, e uma borda de não tecido de viscose. O curativo possui na parte externa uma camada de papel que atua como um sistema de fácil aplicação do filme (retirado assim que o curativo é aplicado) e tiras de não tecido para auxiliar na fixação do cateter e identificação do paciente e data da aplicação. Isento de látex.

Condições de Armazenamento e Conservação: Manter em local limpo e ao abrigo da luz. Manter em temperatura entre 0°C e 40°C.

Precauções e Advertências: Não reutilize o curativo, pois pode comprometer a esterilidade e / ou o desempenho do curativo. Não ingerir e manter afastado de crianças e animais. Para uso sob orientação de um profissional de saúde. Somente para uso externo. Em caso de irritação, descontinue o uso e procure orientação médica.


Instruções de Uso:

1. Abrir o envelope individual de forma asséptica e retirar a janela de papel central do curativo;
2. Em caso de fixação de uma cânula, retirar as tiras de fixação e fixar em abas da cânula de ambos os lados;
3. Retirar a aba maior, expondo a superfície adesiva; em seguida, centralizar cuidadosamente a área transparente do curativo sobre o local de aplicação, para que a frestura em forma de U fixe o cateter ou a cânula e o outro lado do curativo cubra o suporte de plástico da cânula/cateter;
4. Retirar a aba menor da região adesiva do curativo, em seguida, retirar lentamente a moldura de papel ao mesmo tempo que alisa as laterais;
5. Em caso de fixação de um cateter, retirar as tiras de fixação da película de proteção e colocar sobre o curativo, seguindo o protocolo local;
6. Registrar os dados do paciente na tira colorida (se existente);

Como aplicar o curativo 6,5cm x 7,0cm



Como aplicar o curativo 10cm x 12cm

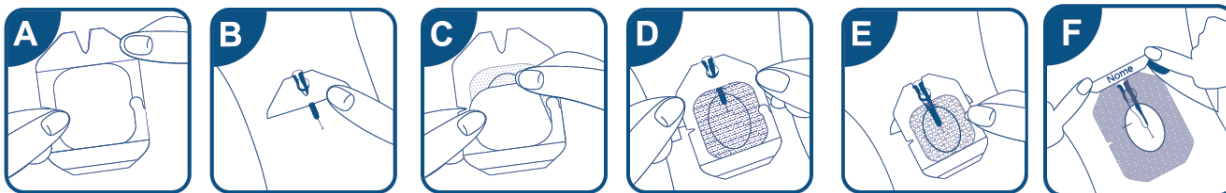

Características da Qualidade:

| Características | Métodos | Valores |
|-------------------------------|---------|---------|
| Adesão (180°) (N/25mm) | 05-011 | 8±2 |
| MVTR (g/m ² / 24h) | 05-050 | 700±200 |

Validade: 05 anos a partir da data de fabricação.

Produto Estéril por Óxido de Etileno. USO ÚNICO. PROIBIDO REPROCESSAR.

Apresentação / Embalagem: O produto se apresenta nas dimensões e embalagens conforme tabela abaixo:

| Cód. Venda | DESCRIÇÃO DO ITEM | DIMENSÃO | EMBALAGEM PRIMÁRIA | EMBALAGEM SECUNDÁRIA | EMBALAGEM DE TRANSPORTE |
|------------|---|-----------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|
| PA.1416 | Curativo de Fixação IV M-TEC 6,5x7cm Cartucho c/ 50UN | 6,5cm x 7,0cm | Envoltório de papel | Cartucho de papel cartão | Caixa de papelão |
| PA.1417 | Curativo De Fixação IV M-TEC 10cm X 12cm Cartucho c/ 50un | 10,0cm x 12,0cm | Envoltório de papel | Cartucho de papel cartão | Caixa de papelão |

Apresentação comercial:

| Cód. Venda | Descrição do item | Curativos/ Cartucho | Cartucho/ Caixa de Embarque | Cód. Barras EAN 13 | Cód. Barras DUN 14 |
|------------|---|---------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | Cartucho | Caixa de Embarque |
| PA.1416 | Curativo de Fixação IV M-TEC 6,5x7cm Cartucho c/ 50UN | 50 | 24 | 7896544902756 | 17896544902753 |
| PA.1417 | Curativo De Fixação IV M-TEC 10cm X 12cm Cartucho c/ 50un | 50 | 24 | 7896544926615 | 17896544926612 |

| | | | |
|-------------|----------------|------------|----------------|
| Elaboração: | Data: __/__/__ | Aprovação: | Data: __/__/__ |
| | | | |