


## CURATIVO DE PU ABSORVENTE M-TEC.

**Descrição:** Possui alta permeabilidade aos vapores de água, prevenindo o acúmulo de umidade embaixo do curativo, reduzindo o crescimento bacteriano e o risco de infecção relacionado ao cateter. Super fino e transparente. É à prova d'água, à prova de bactérias e à prova de vírus. Respirável, evitando a maceração da pele, sensível à pressão, com boas propriedades de adesão e não deixa resíduos na remoção. Possui sistema de aplicação estilo moldura para facilitar o manuseio. Macio e adaptável. Possui na parte externa uma camada de papel que atua como um sistema de fácil aplicação do filme ( retirado assim que o curativo é aplicado ).

### Como aplicar o curativo:

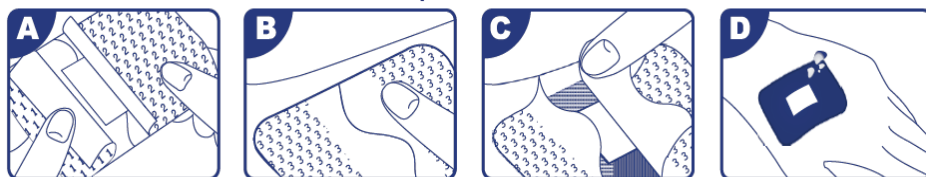

**Composição:** Curativo de filme de poliuretano ( PU ) com adesivo hipoalergênico e uma almofada absorvente central, não aderente de não tecido de viscose, protegidos por um papel siliconizado. Isento de látex. Produto estéril por óxido de etileno.

**Indicação de uso:** Indicado como curativo primário apenas para absorção e proteção de feridas de baixa a moderada exsudação ou cortes pequenos, abrasões. Pode ser usado também como curativo pós operatório para proteção de incisões cirúrgicas.

**Advertências:** Não reutilize o curativo. Não ingerir, manter afastado de crianças e animais. Uso sob orientação de um profissional de saúde. Somente para uso externo. Em caso de irritação, descontinue o uso e procure orientação médica.

**Condições de armazenamento e conservação:** Manter em local limpo e ao abrigo da luz. Manter em temperatura entre 0°C e 40°C. **Validade:** 5 anos a partir da data de fabricação.

**Cadastro Anvisa Nº:** 80003300029

**Instruções de Uso:** 1. Prepare o local de aplicação do produto, realizando desbridamento, tricotomia e limpeza, conforme instruções do protocolo da instituição; 2. Escolha o tamanho adequado para o procedimento a ser realizado; 3. Abra cuidadosamente a embalagem estéril; 4. Remova a película protetora sobre o visor do curativo; 5. Remova a película protetora da face adesiva do curativo; 6. Aplique o curativo sobre o local desejado, fazendo visualização por meio do visor, certifique-se de não estar esticando o curativo durante a aplicação; 7. Faça a remoção da última película protetora sobre a face adesiva do curativo; 8. Remova as bordas do curativo, fazendo leve pressão do centro às bordas o curativo, a fim de garantir total fixação do mesmo.

**Embalagem:** O produto se apresenta nas dimensões e nas quantidades conforme tabela abaixo:



CÓDIGO  
PA. 1418

DESCRIÇÃO  
Curativo de PU Absorvente M-Tec 10cm x 10cm

APRESENTAÇÃO  
100 unidades

EAN  
7896544902718