


CURATIVO DE PU ABSORVENTE M-TEC.

Descrição: Curativo de filme de poliuretano (PU) com adesivo hipoalergênico e uma almofada absorvente central, protegidos por um papel siliconizado. Reduz risco de infecção por prevenir acúmulo de umidade. O filme de poliuretano M-TEC possui alta permeabilidade aos vapores de água, prevenindo o acúmulo de umidade embaixo do curativo, reduzindo o crescimento bacteriano e o risco de infecção relacionado ao cateter. **Indicação de uso:** Indicado como curativo primário apenas para absorção e proteção de feridas de baixa a moderada exsudação ou cortes pequenos, ou abrasões. Pode ser usado também como curativo pós operatório para proteção de incisões cirúrgicas. **Instruções de Uso:** **1.** Prepare o local de aplicação do produto, realizando desbridamento, tricotomia e limpeza, conforme instruções do protocolo da instituição; **2.** Escolha o tamanho adequado para o procedimento a ser realizado; **3.** Abra cuidadosamente a embalagem estéril; **4.** Remova a película protetora sobre o visor do curativo; **5.** Remova a película protetora da face adesiva do curativo; **6.** Aplique o curativo sobre o local desejado, fazendo visualização por meio do visor, certifique-se de não estar esticando o curativo durante a aplicação; **7.** Faça a remoção da última película protetora sobre a face adesiva do curativo; **8.** Remova as bordas do curativo, fazendo leve pressão do centro às bordas do curativo, a fim de garantir total fixação do mesmo.

Como aplicar o curativo:

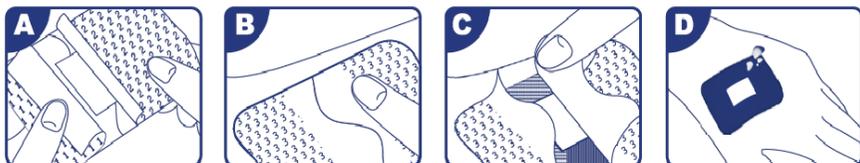

- Super fino e transparente.
- Almofada Absorvente
- Fixação de Curativos Primários ou de baixa aderência
- Reduz riscos de infecção, pois o filme de poliuretano é à prova d'água, à prova de bactérias e à prova de vírus.
- Curativo respirável, evitando a maceração da pele.
- Adesivo sensível à pressão hipoalergênico, com boas propriedades de adesão e não deixa resíduos na remoção.
- O curativo possui sistema de aplicação estilo moldura para facilitar o manuseio.
- Macio e adaptável

Composição: Composto por uma película de poliuretano (PU) transparente com uma camada adesiva acrílica hipoalergênica, uma almofada central não aderente de não tecido de viscose, protegidos por um papel siliconizado. O curativo possui na parte externa uma camada de papel que atua como um sistema de fácil aplicação do filme (retirado assim que o curativo é aplicado). Isento de látex. **Advertências:** Não reutilize o curativo. Não ingerir e manter afastado de crianças e animais. Para uso sob orientação de um profissional de saúde. Somente para uso externo. Em caso de irritação, descontinue o uso e procure orientação médica. Produto Estéril por Óxido de etileno. USO ÚNICO. PROIBIDO REPROCESSAR. **Condições de armazenamento e conservação:** Manter em local limpo e ao abrigo da luz. Manter em temperatura entre 0°C e 40°C. **Validade:** 05 anos a partir da data de fabricação. **Cadastro Anvisa N°:** 80003300029. **Embalagem:** O produto se apresenta nas dimensões e nas quantidades conforme tabela abaixo:



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	EAN
PA. 1418	Curativo de PU Absorvente M-Tec 10cm x 10cm	100 unidades	7896544902718