

Modo de aplicação:



CURATIVO DE ESPUMA ABSORVENTE COM BORDAS DE SILICONE M-TEC.

Descrição: O Curativo de espuma absorvente com bordas tem um adesivo de silicone macio perfurado que permite a passagem do exsudato para a camada de espuma absorvente evitando o excesso de fluido causando maceração em uma pele saudável, seu adesivo de silicone permite também a remoção indolor e atraumática da pele. Difere em ter uma borda de filme de poliuretano (PU) com adesivo de silicone, para que o curativo possa ser aplicado sem fita de fixação ou secundário. **Composição:** Composto por uma camada perfurada adesiva de silicone, uma espuma hidrófila de poliuretano (PU) e um filme de barreira impermeável de poliuretano (PU), protegidos por um papel siliconizado. Isento de látex. Possui borda de PU adesiva externa adicional. **Indicação de uso:** Os curativos de Espuma Absorvente com Bordas M-TEC são indicados para feridas crônicas e agudas de moderada a alta exsudação. O curativo pode ser usado durante o processo de cicatrização nas seguintes feridas: úlceras de pressão, úlceras venosas na perna, úlceras diabéticas, lacerações, abrasões, enxertos e doadores, feridas cirúrgicas pós-operatórias, queimaduras de espessura superficial e parcial e feridas profundas como curativo secundário. O curativo de espuma com borda é adequado para uso sobre bandagem por compressão. **Precauções:** Não reutilize, não ingerir, manter longe do alcance de crianças e animais. Somente uso externo e em caso de irritação, descontinue o uso e procure orientação médica. **Validade:** 03 anos a partir da data de fabricação. **Cadastro Anvisa Nº:** 80003300020. **Registro Anvisa Nº** 80003300037 (Sacral). **Embalagem:** O produto se apresenta nas dimensões e nas quantidades conforme tabela abaixo:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	EAN
PA. 1420	Curativo de Espuma Absorvente com Bordas de Silicone 10cm x 10cm	10 uni.	7896544901773
PA. 1460	Curativo de Espuma Absorvente com Bordas de Silicone 15cm x 15cm	Cartucho com 5 uni.	7896544925694
PA. 1457	Curativo de Espuma Sacral Absorvente com Bordas de Silicone 22cm x 22cm	Cartucho com 3 uni.	7896544925649