

	Especificação de Produto 12-037	Revisão N°.:04 Data Emissão: 15/08/2022 Data Revisão: 23/06/2025 Resp.: P&D
---	--	--

Especificação Técnica de Produto

Produto: Curativo de Espuma Absorvente de silicone sem bordas adesivas M-TEC

O curativo de espuma absorvente possui uma camada de contato com a ferida que é um gel de silicone macio perfurado que permite a remoção indolor, atraumática e permite a passagem do exsudato para a camada de espuma absorvente, evitando o excesso de fluido causando maceração em uma pele saudável.

Composição: Composto por uma camada perfurada adesiva de silicone, uma espuma hidrófila de poliuretano (PU) e um filme de barreira impermeável de poliuretano (PU), protegidos por um papel siliconizado. Isento de látex

Indicações: *O curativo de Espuma Não Aderente M-TEC é indicado para feridas crônicas e agudas de moderada a alta exsudação. O curativo pode ser usado durante o processo de cicatrização nas seguintes feridas: lesão por pressão, úlceras vasculogênicas, úlceras do pé diabético, lacerações, abrasões, enxertos e feridas pós-operatórias, queimaduras de espessura superficial e parcial e feridas profundas como curativo secundário. A Espuma Não Aderente M-TEC é adequada para uso sobre bandagem por compressão.*

Precauções: *Não reutilize o curativo, pois pode comprometer a esterilidade e/ou o desempenho do curativo. Não ingerir e manter afastado de crianças e animais. Para uso sob orientação de um profissional de saúde. Somente para uso externo. Em caso de irritação, descontinue o uso e procure orientação médica.*

Advertências: *Não use em indivíduos com sensibilidade conhecida para filmes ou espumas de poliuretano. Não utilizar com soluções oxidantes, como hipoclorito ou peróxido de hidrogênio, pois podem danificar o componente absorvente de poliuretano do curativo. Produto de uso único. Destruir após o uso. Manter em local limpo e ao abrigo da luz.*

Cadastro Anvisa N°: 80003300037

Modo de uso: Vide folheto de instruções de uso em anexo.

Modo de aplicação:



Validade: 03 anos a partir da data de fabricação

Condições de Armazenamento e Conservação: Manter seco, longe da luz solar direta e recomenda-se manter em locais com limite de temperatura 0- 40° C.

Produto Estéril por Óxido de etileno. USO ÚNICO. PROIBIDO REPROCESSAR

Embalagem: O produto se apresenta nas dimensões e nas quantidades conforme tabela abaixo:

Cód. Venda	Dimensões	Curativos / Cartucho
PA.1422	10cm x 10cm	10
PA.1461	15cm x 15cm	5
PA.1458	8cm x 9cm Traquesostomia	10

11 cm

11 cm

24 cm

24 cm

Missner
Um toque de cuidado

FOLHETO DE INSTRUÇÃO DE USO

**CURATIVO DE ESPUMA
ABSORVENTE**



O curativo de espuma mantém um ambiente úmido para ajudar no processo de cicatrização de feridas moderadas a muito exsudativas. A camada externa do curativo é uma película de poliuretano rosa, de baixa fricção, impermeável, que proporciona uma barreira bacteriana. A camada de contato perfurada permite a absorção do exsudato da ferida e evita o excesso de fluido causando maceração em uma pele saudável. A camada perfurada também protege o leito da ferida de aderir ao curativo, evitando a formação de tecido de granulação nos poros da espuma, reduzindo assim o trauma na remoção do curativo.

COMPOSIÇÃO

Composto por uma camada perfurada adesiva de silicone, uma espuma hidrófila de poliuretano (PU) e um filme de barreira impermeável de poliuretano (PU), protegidos por um papel siliconizado. ISENTO DE LÁTEX.

INDICAÇÃO

O curativo de Espuma Não Aderente M-TEC é indicado para feridas crônicas e agudas de moderada a alta exsudação. O curativo pode ser usado durante o processo de cicatrização nas seguintes feridas: úlceras de pressão, úlceras venosas na perna, úlceras diabéticas, lacerações, abrasões, enxertos e doadores, feridas cirúrgicas pós operatórias, queimaduras de espessura superficial e parcial e feridas profundas como curativo secundário. A Espuma Não Aderente M-TEC é adequada para uso sobre bandagem por compressão.

PRECAUÇÕES

Não reutilize o curativo, pois pode comprometer a esterilidade e/ou o desempenho do curativo. Não ingerir e manter afastado de crianças e animais. Para uso sob orientação de um profissional de saúde. Somente para uso externo. Em caso de irritação, descontinue o uso e procure orientação médica.

ADVERTÊNCIAS

Não use em indivíduos com uma sensibilidade conhecida para filmes ou espumas de poliuretano. Não use com soluções oxidantes, como hipoclorito ou peróxido de hidrogênio, pois podem danificar o componente absorvente de poliuretano do curativo. Produto de uso único. Destruir após o uso. Manter em local limpo e ao abrigo da luz.

INSTRUÇÕES DE USO



1. Irrigar o local da ferida de acordo com o protocolo padrão, se necessário, e secar a pele circundante antes de aplicar o curativo.

2. Selecione um tamanho do Curativo de Espuma Não Aderente M-TEC que é ligeiramente maior do que a ferida. Se necessário, o curativo pode ser cortado usando tesoura esterilizada.
3. Centralize o curativo e aplique suavemente sobre o local da ferida (lado branco em contato com a ferida).
4. O curativo pode ser fixado no lugar com uma fita adequada para garantir que ele permaneça na posição. Certifique-se de que a fita seja aplicada apenas nas bordas e não cobre o curativo, pois isso pode afetar seu desempenho. Alternativamente, se for usado sob bandagem por compressão, a fita não é necessária, uma vez que a bandagem mantém o curativo no local.
5. Descarte qualquer material remanescente do curativo devido ao risco de contaminação.

TROCA E REMOÇÃO DO CURATIVO

1. O Curativo de Espuma Não Aderente pode permanecer no local por até 7 dias, dependendo da condição do paciente e do nível de exsudato. Se houver necessidade de avaliação da ferida antes dos 7 dias, o curativo deve ser removido totalmente e trocado.
2. Remova cuidadosamente o curativo do leito da ferida e descarte-o. Descarte de acordo com os procedimentos e diretrizes locais.
3. Se necessário, limpe o local da ferida com produtos adequados para feridas antes da aplicação de um novo curativo.

FABRICADO POR: Pharmaplast SAE, Amria Free Zone 23512, Alexandria, Egypt.

DISTRIBUÍDO POR: Missner & Missner LTDA,
Rod. BR 470, 2870 - Km 54,6, Blumenau - SC,
Indústria Brasileira. CNPJ: 03.225.411/0001-73.
Resp. Técnico: Dionei Neves - CRQ/13 - SC - N° 13.302.213.

Registro Anvisa nº: 80003300037

Produto Estéril por Óxido de Etileno.
USO ÚNICO. PROIBIDO REPROCESSAR.

Missner & Você
☎ 0800 047 0015
✉ sac@missner.com.br
🌐 www.missner.ind.br



**LISTA E SIGNIFICADO DOS SÍMBOLOS
UTILIZADOS NAS EMBALAGENS**

REF	REPRODUÇÃO DO LOGOTIPO	NÃO REUTILIZAR	DATA DE VALIDADE	CLASSE	LOTE
NÃO REESTERILIZAR	MANUTENHA EM LOCAL SECO	TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO	INDICADO PARA FERRAMENTAS DE INSERÇÃO A 45°	NÃO UTILIZAR DE A PARTIR DESTA DATA	
MANUTENHA AO ABRIGO DE LUZ	DEPOSITO EM LUGAR SECO	STERILE EO	ESTERILIZADO POR GÁS DE ETILENO	CONSIGUA AS INSTRUÇÕES DE USO	ISENTO DE LÁTEX

Elaboração: _____
Data: __/__/__
Jaqueline Schlemper

Aprovação: _____
Data: __/__/__
Dionei Neves