

CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO E PRATA M-TEC.

Descrição: Produto correlato médico hospitalar, classe III (conforme classificação da ANVISA). É apresentado na forma de curativos em placa ou tiras, estéril óxido de etileno. **Composição:** Composto por um alto teor de alginato (Ascophyllum nodosum, conhecido como alga marrom, faz parte da família Fucaceae, como a Alga laminaria) de cálcio (ácido gulurônico (G) e ácido manurônico) e sódio, 4,25% de carboximetilcelulose (CMC) e complexo de prata iônica (Carbonato de Prata), que libera íons de prata na presença de líquido na ferida. Isento de látex. O curativo possui uma concentração de 60mg de prata iônica na placa 10cmx10cm, e na fita de 2cm x 30cm, possui 35mg de prata iônica (Base: 5,92g/m² de prata iônica).

Indicação de uso: O Curativo de Alginato de Cálcio e Sódio e Prata Missner é indicado para uso nas feridas de moderada a alta exsudação e cavidades com espessuras parciais a profundas:

- feridas pós-operatórias;
- feridas por trauma (lesões dérmicas, lesões traumáticas ou incisões);
- úlceras nas pernas;
- úlceras por pressão;

- úlceras diabéticas;
- locais de enxertos e doadores;
- feridas de cavidade;
- queimaduras de espessura superficial e parcial;

O Curativo de Alginato de Cálcio e Sódio e Prata Missner contém alginato, podendo ajudar a apoiar o controle de sangramento menor em feridas superficiais. O composto de prata atua significativamente em bactérias Gram+ e Gram-, como alguns exemplos mais comuns: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa e Escherichia coli. Este produto também pode ser usado sob bandagens de compressão. O Curativo de Alginato de Cálcio e Sódio e Prata Missner pode ser usado no tratamento de feridas infectadas ou não em que haja um risco aumentado de infecção sob a supervisão médica de um profissional de saúde. O Curativo de Alginato de Cálcio e Sódio e Prata Missner é indicado apenas para uso externo. **Advertências:** Não use em indivíduos com uma sensibilidade conhecida à alginatos. Não use como implante cirúrgico. Produto de uso único. Destruir após o uso. Manter em local limpo e ao abrigo da luz. Aconselhável manter em temperatura abaixo de 25°C. Produto estéril por óxido de etileno. USO ÚNICO. PROIBIDO REPROCESSAR. **Precauções:** Não reutilize o curativo, pois pode comprometer a esterilidade e / ou o desempenho do curativo. Não ingerir e manter afastado de crianças e animais. Para uso sob orientação de um profissional de saúde. Somente para uso externo. Em caso de irritação, descontinue o uso e procure orientação médica. **Validade:** 05 anos a partir da data de fabricação. **Apresentações:** cartucho com 10 unidades, embalados individualmente, no tamanho de 10cm x 10cm. **Cadastro Anvisa N°:** 80003300015. **Embalagem:** O produto se apresenta nas dimensões e nas quantidades conforme tabela abaixo:



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	EAN
PA. 0896	Curativo de Alginato de Cálcio e Prata M-Tec 10cm x 10cm	10 unidades	7896544901803
PA. 1453	Curativo de Alginato de Cálcio e Prata M-Tec 2cm x 30m (Fita)	Cartucho com 5 unidades	7896544925625