

Produto: Curativo de Espuma Absorvente Com Bordas Adesivas de Silicone M-TEC



O Curativo de espuma absorvente com bordas tem um adesivo de silicone macio perfurado que permite a passagem do exsudato para a camada de espuma absorvente evitando o excesso de fluido causando maceração em uma pele saudável, seu adesivo de silicone permite também a remoção indolor e atraumática da pele. Difere em ter uma borda de filme de poliuretano (PU) com adesivo de silicone, para que o curativo possa ser aplicado sem fita de fixação ou secundário.

Composição: Composto por uma camada perfurada adesiva de silicone, uma espuma hidrófila de poliuretano (PU) e um filme de barreira impermeável de poliuretano (PU), protegidos por um papel siliconizado. Isento de látex. Possui borda de PU adesiva externa adicional.

Indicação: O curativo M-TEC Espuma Não Aderente é indicado para feridas crônicas e agudas de moderada a alta exsudação. O curativo pode ser usado durante o processo de cicatrização na perna, lesão por pressão, úlceras de perna, úlceras do pé diabético, lacerações, abrasões, enxertos e áreas doadoras, feridas cirúrgicas pós-operatórias, queimaduras de espessura superficial ou parcial e feridas profundas como curativo secundário. O curativo M-TEC Espuma Não Aderente é adequado para uso sobre bandagem por compressão.

Precauções: Não reutilize o curativo, pois pode causar a esterilidade e/ou o desempenho do curativo. Não ingerir e manter afastado de crianças e animais. Para uso sob orientação de um profissional de saúde. Somente para uso externo. Em caso de irritação, descontinue o uso e procure orientação médica.

Advertências: Não use em indivíduos com sensibilidade conhecida para filmes ou espumas de poliuretano. Não use com soluções oxidantes, como hipoclorito ou peróxido de hidrogênio, pois podem danificar o componente absorvente de poliuretano do curativo. Produto de uso único. Destruir após o uso. Manter em local limpo e ao abrigo da luz.

Registro Anvisa N° 80003300037.

Modo de uso: Vide folheto de instruções de uso em anexo.

Modo de aplicação:

Validade: 03 anos a partir da data de fabricação

Condições de Armazenamento e Conservação: Manter em local seco, longe da luz solar direta e recomenda-se manter em locais com limite de temperatura de 0- 40° C

Produto Estéril por Óxido de Etileno. USO ÚNICO. PROIBIDO REPROCESSAR.

Apresentação comercial:

Cód. Venda	Dimensões	Curativos / Cartucho
PA.1420	10cm x 10cm	10
PA.1460	15cm x 15cm	5
PA.1457	22cm x 22cm Sacral	3

Elaboração:	Data: __/__/__	Aprovação:	Data: __/__/__