

Modo de aplicação:



**CURATIVO DE ESPUMA ABSORVENTE DE SILICONE M-TEC.**

O curativo de espuma absorvente possui uma camada de contato com a ferida que é um gel de silicone macio perfurado que permite a remoção indolor, atraumática e permite a passagem do exsudato para a camada de espuma absorvente, evitando o excesso de fluido causando maceração em uma pele saudável. **Composição:** Composto por uma camada perfurada adesiva de silicone, uma espuma hidrófila de poliuretano (PU) e um filme de barreira impermeável de poliuretano (PU), protegidos por um papel siliconizado. Isento de látex. **Indicação de uso:** Os curativos de Espuma Absorvente M-TEC são indicados para feridas de crônicas e agudas de moderada a alta exsudação. O curativo pode ser usado durante o processo de cicatrização nas seguintes feridas: úlceras de pressão, úlceras venosas na perna, úlceras diabéticas, laceração, abrasões, enxertos e doadores, feridas cirúrgicas pós operatórias, queimaduras de espessura superficial e parcial e feridas profundas como curativos secundários. É adequado também para uso sobre bandagem por compressão e seu adesivo de silicone é indicado ao uso de pessoas com pele sensível. **Precauções:** Não reutilizar o curativo, não ingerir e manter afastado de crianças e animais. Somente uso externo e em caso de irritação, descontinue o uso e procure orientação médica. **Condições de Armazenamento e Conservação:** Manter seco, longe da luz solar direta e recomenda-se manter em locais com limite de temperatura 0-40°C. **Produto Estéril por Óxido de etileno. USO ÚNICO. PROIBIDO REPROCESSAR. Validade:** 03 anos a partir da data de fabricação. **Cadastro Anvisa N°:** 80003300037. **Embalagem:** O produto se apresenta nas dimensões e nas quantidades conforme tabela abaixo:



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	EAN
PA. 1422	Curativo de Espuma Absorvente de Silicone 10cm x 10cm	Caixa 10 unidades	7896544901759
PA. 1458	Curativo de Espuma Absorvente para Traqueostomia 8cm x 9cm	Cartucho com 10 unidades	7896544925663
PA. 1461	Curativo de Espuma Absorvente de Silicone 15cm x 15cm	Caixa 10 unidades	7896544901759