

REMOVEDOR DE ADESIVOS AEROSSOL DERMA PROTECT.

Descrição: Produto cosmético, classe I (conforme classificação da ANVISA). É apresentado na forma de aerossol.

Composição: Disiloxane, butano, propano e isobutano. **Indicação de uso:** Remoção fácil da base adesiva e as sobras de resíduos adesivos médicos, sem ardor. Não contém álcool, portanto, não arde nem machuca a pele. Seca em segundos e não afeta as outras adesões, deixando você pronto para aplicar um novo adesivo. **Precauções:** Aplicar o produto sobre a pele, a uma distância de aproximadamente 15 cm. Produto inflamável. Em caso de irritação suspenda o uso. O uso do

Removedor de Adesivos – Derma Protect, deve ser indicado e acompanhado por um profissional habilitado. Mantenha afastado de crianças. Somente para uso externo. Manter sempre em sua embalagem original, em local seco e temperatura ambiente. Não expor o produto à luz solar direta e umidade. **Validade:** 03 anos a partir da data de fabricação. **Cadastro Anvisa Nº:** 25351.075679/2024/17. **Condições de Armazenamento e Conservação:** Manter em local limpo e ao abrigo da luz. Aconselha-se manter em temperatura abaixo de 25°C. **Advertências:** Produto de Uso único. Inflamável, use em áreas bem ventiladas. Evite a manipulação junto de fontes de ignição ou chamas. Evite contato com os olhos. **Apresentações:** em cartucho com 1 unidade no volume de 50mL/30g. **Modo de uso:** Spray/Aerossol: Borrife o Removedor de Adesivos nas extremidades do adesivo médico, aguarde alguns segundos e retire o adesivo. Se houver resistência do adesivo, borrife novamente auxiliando com a outra mão a retirada do adesivo, sempre das extremidades para o interior do curativo.



PARA UMA LIBERAÇÃO RÁPIDA E FÁCIL DE ADESIVOS:

- Reduz a remoção dolorosa e as lesões na pele
- Elimina rapidamente todos os resíduos de adesivo
- Sensação suave e lisa, sem resíduos.

Embalagem: O produto se apresenta nas dimensões e nas quantidades conforme tabela abaixo:

CÓDIGO

PA. 1395

DESCRIÇÃO

Removedor de Adesivos Aerossol Derma Protect 50mL

APRESENTAÇÃO

1 unidade

EAN

7896544926776