

**CURATIVO DE PU FILME TRANSPARENTE EM ROLO M-TEC.**

**Descrição:** Macio e adaptável. Filme de poliuretano não estéril, coberto por um adesivo hipoalergênico transparente, possibilita a visualização do local da punção do IV. Possui um papel na parte superior que permite a fácil aplicação do filme transparente. Super fino, é permeável a vapores, permitindo trocas gasosas e é impermeável a água e bactérias, atuando como barreira de proteção para a pele.

**Como aplicar o curativo:**



**Composição:** Composto por uma película de poliuretano ( PU ) transparente com uma camada adesiva acrílica hipoalergênica, protegido por um papel siliconizado. Possui sistema de aplicação estilo moldura para facilitar o manuseio. Isento de látex.

**Indicação de uso:** Pode ser usado na prevenção de infecções e proteção de tatuagens recentes ( usar somente depois do fim da fase exsudativa ). Fixação de curativos primários ou de baixa aderência, cobertura de suturas, fixação de cateteres e drenos, fixação de bolsas de perna e dispositivos de estoma, fixação de tubos. Reduz riscos de infecção, pois o filme de poliuretano é à prova d'água, à prova de bactérias e à prova de vírus. Adesivo sensível à pressão hipoalergênico, com boas propriedades de adesão e não deixa resíduos na remoção. Proteção de proeminências ósseas ( calcâneo, cotovelo, joelho, região sacra, trocanteriana ).

**Advertências:** Não reutilize o curativo. Não ingerir, manter afastado de crianças e animais. Uso sob orientação de um profissional de saúde. Somente para uso externo. Em caso de irritação, descontinue o uso e procure orientação médica.

**Condições de armazenamento e conservação:** Manter em local limpo e ao abrigo da luz. Manter em temperatura entre 0°C e 40°C.

**Validade:** 5 anos a partir da data de fabricação.

**Cadastro Anvisa N°: 80003300030**

**Instruções de Uso:** **1.** A pele deve estar limpa e seca; **2.** Cortar o Filme Transparente no tamanho desejado; **3.** Destacar uma das laterais do papel protetor do adesivo e aplicar sobre o local/pele; **4.** Remover a outra lateral do papel de proteção do adesivo e posicionar sobre o local/pele; **5.** Pressionar gentilmente as bordas para fixação e a parte central, massageando sobre o papel superior ( quadriculado ); **6.** Remova o papel superior.

**Embalagem:** O produto se apresenta nas dimensões e nas quantidades conforme tabela abaixo:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	EAN
PA. 1415	Curativo de PU Filme Transparente em Rolo M-Tec 10cm x 10cm	caixa 1 unidade	7896544902725
PA. 1482	Curativo de PU Filme Transparente em Rolo M-Tec 15cm x 10cm	caixa 1 unidade	7896544926523