

Produto: Hidrofibra Extra com Prata M-TEC



Descrição: O Hidrofibra Extra com Prata M-TEC é um curativo de camada única que possui capacidade gelificante que absorve e retém exsudato e bactérias dentro da sua estrutura. O curativo Hidrofibra Extra com Prata M-TEC é composto por fibras de CMC, 1,2% de prata iônica e possui fios de reforço que conferem ao curativo alta resistência e garante uma remoção intacta. O curativo Hidrofibra Extra com Prata M-TEC é ideal para o tratamento de feridas infectadas ou não, em que haja um risco aumentado de infecção, sob a supervisão médica de um profissional da saúde.

Indicação: O Curativo Hidrofibra Extra com Prata M-TEC é indicado para uso nas feridas crônicas e agudas infectadas ou com risco de infecção, de moderada a alta exsudação, e cavidades com espessuras parciais a profundas, tais como: Úlceras nas pernas; Lesão por pressão; Úlcera do pé diabético; Feridas pós-operatórias; Queimaduras de espessura parcial; Feridas por trauma (lesões dérmicas, lesões traumáticas ou incisões); Locais de enxertos e doadores; Absorção de exsudato de feridas oncológicas (tumores cutâneos, metástases cutâneas e sarcomas de Kaposi). O curativo Hidrofibra Extra com Prata M-TEC também pode ser usado para controlar sangramentos menores em feridas superficiais. O curativo Hidrofibra Extra com Prata MTEC é adequado para uso sob bandagem por compressão

Registro ANVISA N°: 80003300050.

Composição: composto por fibras de carboximetilcelulose, íons de prata e fios poliéster como reforço. Isento de látex.

Condições de Armazenamento e Conservação: Manter em local limpo e ao abrigo da luz.

Precauções: Não reutilize o curativo, pois pode comprometer a esterilidade e/ou o desempenho do curativo. Não ingerir e manter afastado de crianças e animais. Para uso sob orientação de um profissional de saúde. Em caso de irritação, descontinue o uso e procure orientação médica

Advertências: Não use em indivíduos sensíveis ou que tenham tido reações alérgicas a um dos componentes do curativo. Não use como implante cirúrgico. Produto de uso único. Destruir após o uso.

Instruções de Uso:

1. Faça a desinfecção inicial das mãos antes de manipular o curativo.
2. Limpe a ferida de acordo com os protocolos padrão.
3. Selecione um tamanho de curativo Hidrofibra Extra com Prata M-TEC que é ligeiramente maior que a ferida.
4. Corte (usando tesoura esterilizada) ou dobre o curativo para encaixar a ferida. Aplique diretamente no leito da ferida.
5. Para feridas de cavidade, preencha livremente assegurando que o curativo não se sobrepõe às margens da ferida. Deixe pelo menos 2,5 cm do curativo fora da ferida.
6. Cobrir e proteger com um curativo secundário não oclusivo ou semi-oclusivo, por exemplo Curativo Hidrocoloide M-TEC ou Curativo de Espuma Absorvente com borda adesiva M-TEC.

Troca e Remoção do Curativo:

1. O curativo Hidrofibra Extra com Prata M-TEC pode permanecer no local por até 7 dias, dependendo da condição do paciente e do nível de exsudato. Inicialmente pode ser necessário mudar o curativo a cada 24 horas.
2. Reaplicar curativo Hidrofibra Extra com Prata M-TEC quando o curativo secundário atingiu sua capacidade absorvente ou sempre que uma boa prática de cuidados da ferida for necessária.
3. Para reaplicar, remova suavemente o curativo secundário. Se a ferida parecer seca, saturar o curativo com solução salina estéril antes da remoção.
4. Remova gentilmente o curativo Hidrofibra Extra com Prata M-TEC do leito da ferida e descarte de acordo com os procedimentos e diretrizes locais.
5. Se necessário, irrigar o local da ferida com um limpador de feridas adequado antes da aplicação de um novo curativo.

OBS.: Se a ferida continuar infectada por um período muito longo, deve ser iniciado um tratamento médico adequado. A aplicação do Curativo Hidrofibra Extra com Prata M-TEC pode ser continuada a critério do médico assistente/clínico.

Validade: 05 anos a partir da data de fabricação.

Produto Estéril por Óxido de Etileno. USO ÚNICO. PROIBIDO REPROCESSAR

Apresentação / Embalagem: O produto se apresenta nas dimensões e embalagens conforme tabela abaixo:

DESCRIÇÃO DO ITEM	DIMENSÃO	EMBALAGEM PRIMÁRIA	EMBALAGEM SECUNDÁRIA	EMBALAGEM DE TRANSPORTE
CURATIVO HIDROFIBRA EXTRA COM PRATA 10CM X 10CM 10 UN CARTUCHO	10cm x 10cm	Envoltório de papel	Cartucho de papel cartão	Caixa de papelão

Apresentação comercial:

Cód. Venda	Descrição do item	Curativos/Cartucho	Cód. Barras EAN 13	Cód. Barras EAN 13
			Envoltório	Cartucho
PA. 1495	Curativo Hidrofibra Extra Com Prata 10cm X 10cm 10 Un Cartucho	10	7896544926745	7896544926646

Elaboração:	Data: __/__/__	Aprovação:	Data: __/__/__
Jaqueline Schlemper		Dioney Neves	