


**CURATIVO HIDROFIBRA EXTRA COM PRATA M-TEC.**

**Descrição:** Possui capacidade gelificante que absorve e retém exsudato e bactérias dentro da sua estrutura. É composto por fibras de CMC com íons de prata e possui fios de reforço que conferem ao curativo alta resistência e garante uma remoção intacta. É ideal para o tratamento de feridas infectadas ou não, em que haja um risco aumentado de infecção, sob a supervisão médica de um profissional da saúde. **Composição:** Composto por fibras de carboximetilcelulose, íons de prata e fios poliéster como reforço. Isento de látex. **Indicação de uso:** É indicado para uso nas feridas crônicas e agudas infectadas ou com risco de infecção, de moderada a alta exsudação, e cavidades com espessuras parciais a profundas, tais como: Úlceras nas pernas; Lesão por pressão; Úlcera do pé diabético; Feridas pós-operatórias; Queimaduras de espessura parcial; Feridas por trauma (lesões dérmicas, lesões traumáticas ou incisões); Locais de enxertos e doadores; Absorção de exsudato de feridas oncológicas (tumores cutâneos, metástases cutâneas e sarcomas de Kaposi). Também pode ser usado para controlar sangramentos menores em feridas superficiais. É adequado para uso sob bandagem por compressão. **Precauções: Produto Estéril por Óxido de Etileno. USO ÚNICO. PROIBIDO REPROCESSAR.** Não reutilize o curativo, pois pode comprometer a esterilidade e/ou o desempenho do curativo. Não ingerir e manter afastado de crianças e animais. Para uso sob orientação de um profissional de saúde. Em caso de irritação, descontinue o uso e procure orientação médica. Manter em local limpo e ao abrigo da luz. **Contraindicações:** Não use em indivíduos sensíveis ou que tenham tido reações alérgicas a um dos componentes do curativo. Não use como implante cirúrgico. Produto de uso único. Destruir após o uso. **Instruções de uso:** 1. Faça a desinfecção inicial das mãos

antes de manipular o curativo. 2. Limpe a ferida de acordo com os protocolos padrão. 3. Selecione um tamanho de Curativo Hidrofibra Extra com Prata M-TEC que é ligeiramente maior que a ferida. 4. Corte (usando tesoura esterilizada) ou dobre o curativo para encaixar a ferida. Aplique diretamente no leito da ferida. 5. Para feridas de cavidade, preencha livremente assegurando que o curativo não se sobreponha às margens da ferida. Deixe pelo menos 2,5 cm do curativo fora da ferida. 6. Cobrir e proteger com um curativo secundário não oclusivo ou semi-oclusivo, por exemplo Curativo Hidrocoloide M-TEC ou Curativo de Espuma Absorvente com borda adesiva M-TEC. OBS: Para feridas infectadas recomenda-se o uso do Curativo Hidrofibra Extra M-TEC combinado a um agente antimicrobiano. **Troca e Remoção do Curativo:** 1. Pode permanecer no local por até 7 dias, dependendo da condição do paciente e do nível de exsudato. Inicialmente pode ser necessário mudar o curativo a cada 24 horas. 2. Reaplicar quando o curativo secundário atingiu sua capacidade absorvente ou sempre que uma boa prática de cuidados da ferida for necessária. 3. Para reaplicar, remova suavemente o curativo secundário. Se a ferida parecer seca, saturar o curativo com solução salina estéril antes da remoção. 4. Remova gentilmente do leito da ferida e descarte de acordo com os procedimentos e diretrizes locais. 5. Se necessário, irrigar o local da ferida com um limpador de feridas adequado antes da aplicação de um novo curativo. OBS.: Se a ferida continuar infectada por um período muito longo, deve ser iniciado um tratamento médico adequado. A aplicação pode ser continuada a critério do médico assistente/clínico. **Validade:** 05 anos a partir da data de fabricação. **Registro Anvisa nº:** 80003309013. **Embalagem:** O produto se apresenta nas dimensões e nas quantidades conforme tabela abaixo:

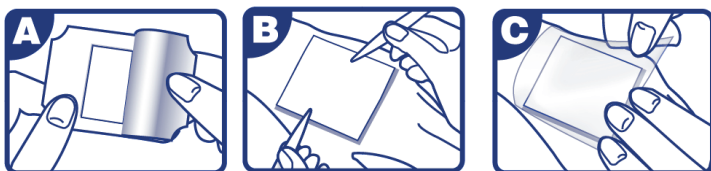

**CÓDIGO**

PA. 1495

**DESCRIÇÃO**

Curativo Hidrofibra Extra com Prata 10cm X 10cm

**APRESENTAÇÃO**

Cartucho com 10 unidades

**EAN**

7896544926646

