

Produto: Generacell – Biocelulose Membrana Hidratada



Descrição: O curativo à base de fibras de celulose é uma membrana permeável hidroativo que promove um ambiente úmido, contribui para a redução da dor, é de fácil manuseio e não aderente, o que facilita sua remoção. O curativo pode ser usado como substituto temporário da pele em caso de queimaduras ou em casos de lesões resultantes da perda de tecido.

Indicação: O Generacell – Biocelulose Membrana Hidratada é indicado para o tratamento de feridas agudas e crônicas de baixa a média exsudação, como úlceras vasculogênicas e arteriais nas pernas, úlceras do pé diabético, lesão por pressão, tratamento de queimaduras de 1º e 2º grau, enxerto de pele, áreas doadoras de enxerto, abrasões e escoriações. O Generacell – Biocelulose Membrana Hidratada é adequado para uso sob bandagem com compressão.

Registro ANVISA N°: 80003300049.

Composição: fibras de celulose renovável embebido em soro fisiológico.

Condições de Armazenamento e Conservação: Manter em local limpo e ao abrigo da luz.

Precauções: Não reutilize o curativo, pois pode comprometer a esterilidade e/ou o desempenho do curativo. Não ingerir e manter afastado de crianças e animais.

Para uso sob orientação de um profissional de saúde. Em caso de irritação, descontinue o uso e procure orientação médica.

Advertências: Não use em indivíduos sensíveis ou que tenham tido reações alérgicas a um dos componentes do curativo. Não use como implante cirúrgico. Produto de uso único. Destruir após o uso.

Instruções de Uso:

Verificar se a embalagem se apresenta íntegra e dentro do prazo de validade do produto e da esterilização;

Limpar e secar cuidadosamente o local de aplicação da cobertura de acordo com as técnicas assépticas previamente preconizadas e em seguida, secar cuidadosamente as bordas da ferida com compressas esterilizadas. Se necessário, aplique medicamento;

3. Selecionar o curativo Generacell – Biocelulose Membrana Hidratada adequado ao procedimento a ser realizado;

4. Abrir cuidadosamente a embalagem estéril e retirar o filme de proteção do curativo;

5. Aplicar o curativo sobre a ferida e adaptar a forma do mesmo. No caso do curativo em forma de fita, deve-se dobrar a mesma suavemente sobre a ferida;

6. Em função do grau de exsudato aplica-se um curativo secundário adequado: Filme transparente rolo M-TEC ou Curativo de Espuma Absorvente M-TEC;

Troca e Remoção do Curativo

1. O Generacell – Biocelulose Membrana Hidratada pode permanecer no local por até 7 dias, dependendo da condição do paciente, do nível de exsudato e das indicações do médico;

2. Reaplicar Generacell – Biocelulose Membrana Hidratada quando o curativo secundário atingiu sua capacidade absorvente ou sempre que uma boa prática de cuidados da ferida for necessária.

3. Para reaplicar, remova suavemente o curativo secundário. Se a ferida parecer seca, saturar o curativo com solução salina estéril antes da remoção.

4. Remova gentilmente o Generacell – Biocelulose Membrana Hidratada do leito da ferida pelas bordas e descarte de acordo com os procedimentos e diretrizes locais.

5. Se necessário, irrigar e limpar o local da ferida com um limpador de feridas adequado antes da aplicação de um novo curativo.

Validade: 03 anos a partir da data de fabricação.

Produto Estéril por Irradiação Gama. USO ÚNICO. PROIBIDO REPROCESSAR.

Apresentação / Embalagem: O produto se apresenta nas dimensões e embalagens conforme tabela abaixo:

DESCRIÇÃO DO ITEM	DIMENSÃO	EMBALAGEM PRIMÁRIA	EMBALAGEM SECUNDÁRIA	EMBALAGEM DE TRANSPORTE
Generacell Biocelulose Membrana Hidratada 10cm X 10cm 10un Por Cartucho	10 x 10cm	Envoltório de papel	Cartucho de papel cartão	Caixa de papelão

Apresentação comercial:

Cód. Venda	Descrição do item	Curativos/Cartucho	Cód. Barras EAN 13
			Cartucho
PA. 1499	Generacell Biocelulose Membrana Hidratada 10cm X 10cm 10un Por Cartucho	10	17896544926650

Elaboração:	Data: __/__/__	Aprovação:	Data: __/__/__