

CURATIVO BIOCELULOSE HIDRATADA M-TEC.

Descrição: O curativo à base de fibras de celulose é uma membrana permeável hidroativo que promove um ambiente úmido, contribui para a redução da dor, é de fácil manuseio e não aderente, o que facilita sua remoção. O curativo pode ser usado como substituto temporário da pele em caso de queimaduras ou em casos de lesões resultantes da perda de tecido. **Composição:** Fibras de celulose renovável embebido em soro fisiológico. **Indicação de uso:** É indicado para o tratamento de feridas agudas e crônicas de baixa a média exsudação, como úlceras vasculogênicas e arteriais nas pernas, úlceras do pé diabético, lesão por pressão, tratamento de queimaduras de 1º e 2º grau, feridas cirúrgicas, enxerto de pele, áreas doadoras de enxerto, abrasões e escoriações. É adequado para uso sob bandagem com compressão. **Precauções:** **Produto Estéril por Irradiação** **Gama. USO ÚNICO. PROIBIDO REPROCESSAR.** Não ingerir e manter afastado de crianças e animais. Para uso sob orientação de um profissional de saúde. Em caso de irritação, descontinue o uso e procure orientação médica. **Contraindicações:** Não use em indivíduos sensíveis ou que tenham tido reações alérgicas a um dos componentes do curativo. Não use como implante cirúrgico. Produto de uso único. Destruir após o uso. Manter em local limpo e ao abrigo da luz. **Instruções de uso:** 1. Verificar se

a embalagem apresenta-se íntegra e dentro do prazo de validade do produto e da esterilização; 2. Limpar e secar cuidadosamente o local de aplicação da cobertura de acordo com as técnicas assépticas previamente preconizadas e em seguida secar cuidadosamente os bordos da ferida com compressas esterilizadas. Se necessário aplique medicamento; 3. Selecione o curativo Biocelulose Hidratada M-TEC adequado ao procedimento a ser realizado; 4. Abrir cuidadosamente a embalagem estéril e retire o filme de proteção do curativo; 5. Aplique o curativo sobre a ferida e adapte a forma do mesmo. No caso do curativo em forma de fita, deve-se dobrar a mesma suavemente sobre a ferida; 6. Em função do grau de exsudato aplica-se um curativo secundário adequado: Filme transparente rolo M-TEC, ou Curativo de Espuma Absorvente M-TEC; **Troca e Remoção do Curativo:** 1. O Curativo Biocelulose Hidratada M-TEC pode permanecer no local por até 7 dias, dependendo da condição do paciente, do nível de exsudato e das indicações do médico; 2. Reaplicar Curativo Biocelulose Hidratada M-TEC quando o curativo secundário atingiu sua capacidade absorvente ou sempre que uma boa prática de cuidados da ferida for necessária. 3. Para reaplicar, remova suavemente o curativo secundário. Se a ferida parecer seca, saturar o curativo com solução salina estéril antes da remoção. 4. Remova gentilmente Curativo Biocelulose Hidratada M-TEC do leito da ferida pelas bordas e descarte de acordo com os procedimentos e diretrizes locais. 5. Se necessário, irrigar e limpar o local da ferida com um limpador de feridas adequado antes da aplicação de um novo curativo. **Validade:** 03 anos a partir da data de fabricação. **Registro Anvisa nº:** 80003309011. **Embalagem:** O produto se apresenta nas dimensões e nas quantidades conforme tabela abaixo:



CÓDIGO
PA, 1499

DESCRIÇÃO
Curativo Biocelulose Hidratada 10cm X 10cm

APRESENTAÇÃO
Cartucho com 10 unidades

EAN
7896544926653