

Produto: Creme Barreira Hidratante Derma Protect Missner



Descrição: Hipoalergênico, dermatologicamente testado e com pH balanceado, o produto é livre de fragrância e compatível com a adesão de curativos. Enriquecido com pós-bióticos, auxilia na reorganização tecidual e contribui para o equilíbrio da microbiota da pele, fortalecendo as defesas naturais do organismo. Produto para saúde de classe de risco II notificado na ANVISA. É apresentado na forma de creme, não estéril. O produto possui 10% de dimeticona.

Indicação: Indicado para proteger a pele contra a umidade constante e fluidos corporais, como urina e fezes, em casos de incontinência. Também pode ser usado para proteção de bordas de feridas exsudativas. É ideal para peles secas, sensíveis ou irritadas.

Notificação ANVISA Nº: 80003309019.

Composição: Água, Ozoquerita, Parafina Líquida, Dimeticona, Cetil PEG/PPG-10/1 Dimeticona, Trimetilsiloxissilicato, Isododecano, Óleo de coco, Glicerol, Pentileno Glicol, Caprililglicol, Etilhexilglicerina, Proteína de Levedura Hidrolisada (e) Butileno Glico (e) Pentileno Glicol, Lisado de Streptococcus thermophilus, Acetato de tocoferila, Sulfato de magnésio, Edetato dissódico.

Condições de Armazenamento e Conservação: Manter em local limpo e ao abrigo da luz.

Precauções: Somente uso externo. Evite contato com os olhos. Mantenha longe do alcance de crianças e animais domésticos.

Contraindicações: Evite o uso em pessoas com histórico de reação alérgica a qualquer componente da formulação. Em caso de irritação, descontinue e suspenda o uso.

Instruções de Uso: Após à pele limpa e seca, aplicar uma pequena quantidade do Creme Barreira Derma Protect e espalhar delicadamente sobre a pele. Ao aplicar em área de dobras, mantenha as partes separadas até o produto secar para depois retorná-las à posição inicial. Reaplicar sempre que necessário. OBSERVAÇÕES: O Creme Barreira Derma Protect é um produto concentrado, por isso, utilize pequenas quantidades. Ao abrir a bisnaga pela primeira vez, pode sair um líquido transparente; isso é normal e não indica deterioração.

Validade: 02 anos a partir da data de fabricação.

Apresentação / Embalagem: O produto se apresenta nas dimensões e embalagens conforme tabela abaixo:

DESCRIÇÃO DO ITEM	DIMENSÃO	EMBALAGEM PRIMÁRIA	EMBALAGEM DE TRANSPORTE
Creme Barreira Derma Protect 60 G	60g	Bisnaga branca com tampa flip top	Caixa de papelão
Creme Barreira Derma Protect 100 G	100g	Bisnaga branca com tampa flip top	Caixa de papelão

Apresentação comercial:

Cód. Venda	Descrição do item	Volume (g)	Bisnaga / CX papelão	Dimensão da caixa (cm)			Cód. Barras EAN 13
				L	C	A	
PA.1525	Creme Barreira Derma Protect 60 G	60	20	232	245	130	7896544926677
PA. 1526	Creme Barreira Derma Protect 100 G	100	12	200	220	156	7896544926684

Elaboração:	Data: __/__/__	Aprovação:	Data: __/__/__