

Missner SPRAY HEMOSTÁTICO DERMA PROTECT MISSNER

Um toque de cuidado

Derma
Protect

O SHOW
DÁ LUNA!



CURATIVO LÍQUIDO HEMOSTÁTICO DERMA PROTECT.

Descrição: Produto correlato médico hospitalar, classe II (conforme classificação da ANVISA). É apresentado na forma de spray, não estéril. **Composição:** HDisiloxane, Dimethicone, Cyclopentasiloxane (and) Dimethiconol, Trimethylsiloxysilicate, Laureth-2, Aqua, Calcium Chloride. **Indicação de uso:** Curativo Líquido Hemostático sem dor Derma Protect pode ser utilizado em pacientes adultos, crianças e bebês com idade superior a 01 mês que estejam com lesões de pele decorrentes de quedas, ralados, fricção ou cisalhamento. **Condições de Armazenamento e Conservação:** Manter sempre em sua embalagem original, em local seco e temperatura ambiente. Não expor o produto à luz solar direta e umidade. **Precauções:** Evite contato com os olhos. Mantenha longe do alcance de crianças e animais domésticos. Em caso de irritação suspenda o uso. O uso do O Curativo Líquido Hemostático sem dor Derma Protect, deve ser indicado e acompanhado por um profissional habilitado. **Contraindicações:** Curativo Líquido Hemostático sem dor Derma Protect está contraindicado para pacientes que apresentam alergia a algum componente da fórmula. **Instruções de uso:** **1.** A pele deve estar limpa e seca antes de aplicar o produto. **2.** A pele deve estar limpa e seca antes de aplicar o produto. **3.** Borrife a uma distância de 10 centímetros da pele e aguarde a secagem. Repita por 3 vezes. A seguir, faça o mesmo na região ao lado e assim por diante, até proteger toda a área desejada. **4.** Ao aplicar em área de dobras, como entre as nádegas, mantenha as partes separadas até o produto secar para depois retorná-las à posição inicial. **5.** Aguarde secar totalmente para colocar um curativo secundário. Reaplicar sempre que necessário. **Validade:** 02 anos a partir da data de fabricação. **Cadastro Anvisa Nº:** 80003309009. **Embalagem:** O produto se apresenta nas dimensões e nas quantidades conforme tabela abaixo:

CÓDIGO

PA.1531

DESCRIÇÃO

Spray Hemostático Derma Protect Missner 28g

APRESENTAÇÃO

20 unidades

EAN

7896544926769