



Instruções de uso: 1. A pele deve estar limpa e seca antes de aplicar o produto. 2. Evite passar cremes ou óleos no local onde for aplicar a película, isso impedirá o Spray Hemostático Derma Protect de protegê-la.

3. Borrife a uma distância de 10 centímetros da pele. 4. Faça o mesmo na região ao lado e assim por diante, até proteger toda a área desejada. 5. Ao aplicar em área de dobras, como entre as nádegas, mantenha as partes separadas até o produto secar para depois retorná-las à posição inicial. 6. Aguarde secar totalmente para colocar a fralda ou colocar um curativo.



CREME BARREIRA DERMA PROTECT MISSNER.

Descrição: Produto correlato médico hospitalar, classe II. É apresentado na forma de spray.

Composição: Hexametildisiloxano, trimetilsiloxilicato, ciclopenta-siloxano, dimeticona, polidimetilsiloxano, álcool laurílico, água, agente hemostático.

Indicação de uso: Pode ser utilizado em pacientes adultos, crianças e bebês com idade superior a 01 mês que estejam com lesões de pele decorrentes de quedas, ralados, fricção ou cisalhamento.

Precauções: Evite contato com os olhos. Mantenha longe do alcance de crianças e animais domésticos. Em caso de irritação suspenda o uso. Deve ser indicado e acompanhado por um profissional habilitado. Produto não estéril.

Advertências: Faça uso do Creme Barreira Derma Protect sob indicação e acompanhamento de um profissional habilitado.

Validade: 2 anos a partir da data de fabricação.

Cadastro Anvisa Nº: 25351022016202408 – Futuro número da ANVISA

Embalagem: O produto se apresenta nas dimensões e nas quantidades conforme tabela abaixo:

CÓDIGO

PA. 1531

DESCRIÇÃO

Spray Hemostático Derma Protect Missner 28g

APRESENTAÇÃO

20 unidades

EAN

7896544926769