

Produto: Solução de Limpeza Derma Protect.



Descrição: Conforme classificação da ANVISA, é um produto correlato médico classe IV, não estéril.

Indicação: Limpeza, descontaminação, tratamento e hidratação de feridas contaminadas agudas e crônicas. Para prevenção e tratamento de biofilme.

Registro ANVISA N°: 80003300046.

Composição: *Água purificada, Polihexanida Biguanida (PHMB) (0,1%), Decil Glicosídeo, Cocoanfoacetato de Sódio, Cocamidopropil Betaína Solução (0,1%), Dimeticona PEG-12, Óleo da Folha de Melaleuca, Verbena, Ácido Cítrico, Pentileno Glicol, Caprililglicol, Etilhexilglicerina.*

Condições de Armazenamento e Conservação: Manter em local limpo e ao abrigo da luz. Armazenar em temperatura ambiente de 15°C a 30°C. Após aberto consumir em até 8 (oito) semanas.

Contraindicação: Em caso de irritação suspenda o uso. Não se deve utilizar em caso de alergia conhecida a qualquer um dos seus componentes. Não utilizar em cartilagem hialina. Não utilizar em associação com tensoativos aniônicos, por estes poderem afetar a sua conservação. Não deve ser misturado com outros produtos de limpeza de feridas, tais como: sabonetes, pomadas, óleos ou enzimas, entre outros. Deve-se assegurar a completa remoção dessas substâncias do leito da ferida.

Modo de uso:

Para limpeza de feridas: Aplique a solução em espuma sobre a área desejada ou, se necessário, com o auxílio de compressa (gaze) para sutil fricção para melhor remoção de resíduos (crostas, sujidades e/ou restos de curativos). **Para um maior conforto do paciente, se desejar, a solução pode ser aquecida até atingir temperatura corporal (recomenda-se aquecer em micro-ondas por 20 segundos).**

Para limpeza da pele: Aplique a solução em espuma diretamente sobre o leito da lesão ou sobre compressas (gaze) para realizar fricção para melhor remoção de resíduos (tecidos desvitalizados, crostas e restos de curativos). Deixe agir até 15 minutos em compressa embebida para garantir ação antibacteriana e redução de biofilme. ***Para um maior conforto do paciente, se desejar, a solução pode ser aquecida até atingir temperatura corporal (recomenda-se aquecer em micro-ondas por 20 segundos).***

OBS.: Siga o sentido correto da limpeza, da área mais limpa para a mais contaminada. Caso haja necessidade, repita a operação. Não há necessidade de secar o leito de feridas, apenas em pele íntegra.

Validade: 03 anos a partir da data de fabricação.

Apresentação / Embalagem: O produto se apresenta nas dimensões e embalagens conforme tabela abaixo:

Cód. Venda	Descrição do item	Dimensões (mL)	Frascos / Cx Papelão	Cód. Barras EAN 13	Cód. Barras DUN 14
				Unidade	Caixa de Embarque
PA.1537	SOLUÇÃO DE LIMPEZA AQUOSA DERMA PROTECT – FRASCO 350 mL	350	10	7896544927292	17896544927299
PA.1448	SOLUÇÃO DE LIMPEZA DERMA PROTECT EM ESPUMA – FRASCO 150 mL	150	10	7896544926868	17896544926865
PA.1612	SOLUÇÃO DE LIMPEZA DERMA PROTECT EM ESPUMA – FRASCO 50 mL	50	10	7896544927285	17896544927282

Elaboração:	Data: __/__/__	Aprovação:	Data: __/__/__