

Produto: Missner Curativo Hidrocoloide para Acnes.



Descrição: O Curativo Hidrocoloide para Acnes serve como uma barreira protetora para reduzir a exposição da acne e pequenos ferimentos aos meios externos e às contaminações. A tecnologia hidrocoloide funciona como secativo, absorvente as secreções, amenizando a vermelhidão e oleosidade da pele. O curativo Hidrocoloide para Acnes é permeável ao vapor de água, mas impermeável às secreções e aos microorganismos, por isso permite a troca gasosa da pele, auxilia na cicatrização e previne infecções. O Curativo Hidrocoloide para Acnes é discreto, confortável e disfarça a espinha, além disso, permite o uso de maquiagem com o curativo no rosto.

Indicação: Proteção de acnes e pequenos ferimentos. Absorção de secreções, redução da vermelhidão e da oleosidade da pele. Produto para uso tópico e externo.

Registro ANVISA N°: 80003300041.

Composição: Filme autoadesivo semipermeável de poliuretano e polímero de carboximetilcelulose (CMC). Isento de látex.

Condições de Armazenamento e Conservação: Manter em local limpo e ao abrigo da luz.

Precauções: Somente uso externo. Evite contato com os olhos. Mantenha longe do alcance de crianças e animais domésticos. Evite o uso em pessoas com histórico de reação alérgica a qualquer componente do produto. Em caso de irritação descontinue o uso e procure orientação médica.

Advertências: Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido reprocessar. Não compre se a embalagem estiver violada. Uso tópico para secar espinhas. Este produto não atua na causa raiz da oleosidade ou na prevenção da formação de novas espinhas.

Instruções de Uso:

1. Lave e seque as mãos e o local que será aplicado o curativo.
2. Retire o curativo da cartela evitando colocar as mãos na parte adesiva.
3. Aplique o curativo na região desejada e certifique-se que ele esteja bem aderido.

4. Recomenda-se manter o curativo por no mínimo 12h no local. Troque o curativo apenas quando ele começar a descolar sozinho. É normal o curativo adquira uma coloração esbranquiçada durante o uso, indicando a absorção das secreções.

Validade: 03 anos a partir da data de fabricação.

Produto Estéril por **Irradiação Gama**. USO ÚNICO. PROIBIDO REPROCESSAR.

Apresentação / Embalagem: O produto se apresenta nas dimensões e embalagens conforme tabela abaixo:

Apresentação comercial:

Cód. Venda	Descrição do item	Curativos/Cartucho	Cartuchos / Cx papelão	Cód. Barras EAN 13
				Cartucho
PA.1604	9 un 12 mm 5 un 10 mm 10 un 7 mm	24	25	7896544901346

Elaboração:	Data: __/__/__	Aprovação:	Data: __/__/__