

# Missner


Um toque de cuidado

## CURATIVO HIDROCOLOIDE PARA ACNES

### CURATIVO HIDROCOLOIDE PARA ACNES.

**Descrição:** O Curativo Hidrocoloide para Acnes serve como uma barreira protetora para reduzir a exposição da acne e pequenos ferimentos aos meios externos e às contaminações. A tecnologia hidrocoloide funciona como secativo, absorvente das secreções, amenizando a vermelhidão e oleosidade da pele. O curativo Hidrocoloide para Acnes é permeável ao vapor de água, mas impermeável às secreções e aos microorganismos, por isso permite a troca gasosa da pele, auxilia na cicatrização

e previne infecções. O Curativo Hidrocoloide para Acnes é discreto, confortável e disfarça a espinha, além disso, permite o uso de maquiagem com o curativo no rosto. **Composição:** Filme autoadesivo semipermeável de poliuretano e polímero de carboximetilcelulose (CMC). Isento de látex. **Indicação de uso:** Proteção de acne e pequenos ferimentos. Absorção de secreções, redução da vermelhidão e da oleosidade da pele. Produto para uso tópico e externo. **Precauções:** Somente uso externo. Evite contato com os olhos. Mantenha longe do alcance de crianças e animais domésticos. Evite o uso em pessoas com histórico de reação alérgica a qualquer componente do produto. Em caso de irritação descontinue o uso e procure orientação médica. **Contraindicações:** Não use em indivíduos sensíveis ou que tiveram reações alérgicas a um dos componentes do curativo. Não use como implante cirúrgico. Produto de uso único. Destruir após o uso. **Advertências:** Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido reprocessar. Não compre se a embalagem estiver violada. Uso tópico para secar espinhas. Este produto não atua na causa raiz da oleosidade ou na prevenção da formação de novas espinhas. **Instruções de Uso:** 1. Lave e seque as mãos e o local que será aplicado o curativo, 2. Retire o curativo da cartela evitando colocar as mãos na parte adesiva, 3. Aplique o curativo na região desejada e certifique-se que ele esteja bem aderido, 4. Recomenda-se manter o curativo por no mínimo 12h no local. Troque o curativo apenas quando ele começar a descolar sozinho. É normal o curativo adquira uma coloração esbranquiçada durante o uso, indicando a absorção das secreções. **Condições de Armazenamento e Conservação:** Manter em local limpo e ao abrigo da luz. **USO ÚNICO. PROIBIDO REPROCESSAR. Validade:** 03 anos a partir da data de fabricação. **Registro Anvisa Nº:** 80003300041. **Embalagem:** O produto se apresenta nas dimensões e nas quantidades conforme tabela abaixo:

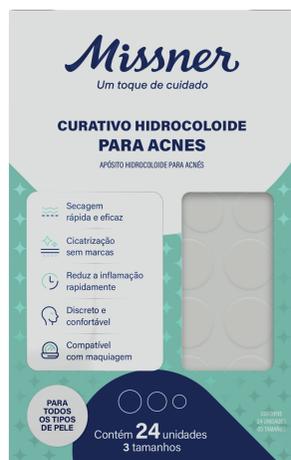

CÓDIGO  
PA. 1604

DESCRIÇÃO  
Curativo Hidrocoloide para acne

APRESENTAÇÃO  
Caixa 25 cartuchos com 24 unidades

EAN  
7896544901346