

**CURATIVO HIDROCOLOIDE PARA BOLHAS E CALOS M-TEC.**

**Descrição:** O Curativo Hidrocoloide para bolhas e calos é ideal para alívio do desconforto gerado por bolhas e calos já existentes nos pés, mãos e cotovelos e também para prevenção e proteção contra atrito, fricção e pressão em regiões susceptíveis a bolhas e calos. Possui tecnologia hidrocoloide de alta performance para absorção de secreções e umidade da pele, além de contribuir para o alívio da inflamação, redução da vermelhidão e aceleração da cicatrização. **Composição:** Filme autoadesivo semipermeável de poliuretano e polímero de carboximetilcelulose (CMC). Isento de látex. **Indicação de uso:** Prevenção e proteção de bolhas, calos e pequenas lesões, causadas por atrito, fricção e pressão. Pode ser usado em pés, mãos e cotovelos ou qualquer outra região susceptível a bolhas e calos. Produto para uso tópico e externo. **Precauções:** Somente uso externo.

Evite contato com os olhos. Mantenha longe do alcance de crianças e animais domésticos. Evite o uso em pessoas com histórico de reação alérgica a qualquer componente do produto. Em caso de irritação descontinue o uso e procure orientação médica. **Advertências:** Produto de uso único. Destruir após o uso, Proibido reprocessar. Não compre se a embalagem estiver violada. **Condições de Armazenamento e Conservação:** Manter em local limpo e ao abrigo da luz. **Instruções de Uso:** **1.** Lave e seque as mãos e o local que será aplicado o curativo. **2.** Retire o papel de proteção do curativo sem tocar a região adesiva. **3.** Aplique o curativo na região desejada e certifique-se que o curativo esteja bem aderido. **4.** Troque o curativo apenas quando ele começar a descolar sozinho. É normal o curativo adquira uma coloração esbranquiçada durante o uso, indicando a absorção das secreções. **Validade:** 03 anos a partir da data de fabricação. **Registro Anvisa Nº:** 80003300040. **Embalagem:** O produto se apresenta nas dimensões e nas quantidades conforme tabela abaixo:



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	EAN
PA. 1605	Curativo Hidrocoloide para bolhas e calos	Caixa 24 cartuchos com 8 unidades	7896544927230