



GENERACELL BIOCELULOSE EM GEL.

Composição: **Parte A:** Aqua, Glycerin, Microbial Cellulose, Algin, 2-Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin. **Composição Solução Ativadora – Parte B:** Aqua, Calcium Chloride, 2-Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin. **Indicação de uso:** Indicada para formar uma barreira mecânica e manter o microclima, auxiliando no cuidado de lesões com rompimento da epiderme ou de membranas mucosas. Oferece alívio da dor em casos de exposição de terminações nervosas superficiais, como em queimaduras de 1º e 2º grau e no pós-procedimento estético, como peelings e microagulhamentos. Além disso, reduz o risco de infecção graças à sua função protetora e auxilia na absorção de exsudatos provenientes das lesões em tratamento. **Precauções:** Somente uso externo. Não reutilizar o curativo, pois pode comprometer o desempenho do curativo. Não ingerir e manter afastado de crianças e animais. Para uso sob orientação de um profissional de saúde. Em caso de irritação, descontinuar o uso e procurar orientação médica. **Advertências:** Não use em indivíduos sensíveis ou que tenham tido reações alérgicas a um dos componentes do curativo. Não use como implante cirúrgico. Produto de uso único. Destruir após o uso. Este produto não é absorvido pelo corpo. **Condições de Armazenamento e Conservação:** Manter em temperatura ambiente, em local limpo e ao abrigo da luz. Não expor o produto à luz solar direta e umidade. **Validade:** 02 anos a partir da data de fabricação. **Registro Anvisa nº:** 80003309015. **Embalagem:** O produto se apresenta nas dimensões e nas quantidades conforme tabela abaixo:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	EAN
PA. 1680	Biocelulose em gel 10g mais 8ml de solução ativadora	Cartucho com 5 unidades	7896544927711