

Produto: Solução Spray Antisséptico Missner



Descrição: Conforme classificação da ANVISA, é um produto correlato médico classe IV, não estéril.

Indicação: Limpeza, descontaminação, tratamento e hidratação de feridas contaminadas agudas e crônicas. Para prevenção e tratamento de biofilme.

Registro ANVISA N°: 80003300046.

Composição: Água purificada, Polihexanida Biguanida (PHMB), Decil Glicosídeo, Cocoanfoacetato de Sódio, Cocamidopropil Betaína Solução, Dimeticona PEG-12, Óleo da Folha de Melaleuca, Verbena, Ácido Cítrico, Pentileno Glicol, Caprililglicol, Etilhexilglicerina.

Condições de Armazenamento e Conservação: Manter em local limpo e ao abrigo da luz. Armazenar em temperatura ambiente de 15°C a 30°C. Após aberto consumir em até 8 (oito) semanas.

Contraindicação: Em caso de irritação suspenda o uso. Não se deve utilizar em caso de alergia conhecida a qualquer um dos seus componentes. Não utilizar em cartilagem hialina. Não utilizar em associação com tensoativos aniônicos, por estes poderem afetar a sua conservação. Não deve ser misturado com outros produtos de limpeza de feridas, tais como: sabonetes, pomadas, óleos ou enzimas, entre outros. Deve-se assegurar a completa remoção dessas substâncias do leito da ferida.

Modo de uso:

Aponte o spray para o local machucado, mantendo uma distância de 5 a 10 cm da pele.

Aplique a solução sobre a área desejada, pressione de 2 a 3 vezes, dependendo do tamanho do machucado.

Se necessário, para sutil fricção, utilize uma compressa (gaze), removendo assim possíveis resíduos (crostas, sujidades e/ou restos de curativos).

Se quiser, você pode cobrir o local com uma gaze ou outro curativo.

Use o produto de 3 a 4 vezes por dia.

Obs.: Caso haja necessidade, repita o passo a passo. Não há necessidade de secar o local do ferimento, apenas a pele íntegra ao redor.

Validade: 03 anos a partir da data de fabricação.

Apresentação / Embalagem: O produto se apresenta nas dimensões e embalagens conforme tabela abaixo:

Cód. Venda	Descrição do item	Dimensões (mL)	Cartucho / Cx Papelão	Cód. Barras EAN 13	Cód. Barras DUN 14
				Unidade	Caixa de Embarque
PA.1685	SOLUÇÃO SPRAY ANTISSEPTICO MISSNER 28 mL	28	12	7896544927735	17896544927732

Elaboração: Juliana Orzechowski	Data: __/__/__	Aprovação: Dionei Neves	Data: __/__/__