

TOALHA UMEDECIDA

BANHO DE LEITO



*Revolucione o cuidado
ao paciente com nossa
solução inovadora*

Apresentamos as Toalhas de Banho no Leito Descartáveis - a solução que está transformando o cuidado na hora da higienização de pacientes, com eficácia comprovada por pesquisa científica apresentado no prestigiado Congresso europeu de Tratamento de Feridas (EWMA) 2025 em Barcelona.

BENEFÍCIOS COMPROVADOS POR PESQUISA CIENTÍFICA PARA O PACIENTE

Maior Segurança Clínica

Preserva parâmetros vitais como saturação de oxigênio e frequência cardíaca, diferentemente do banho tradicional, evitando instabilidade hemodinâmica.

Pele Mais Saudável

Preserva a barreira cutânea e mantém a hidratação natural da pele graças à solução emoliente e hidratante presente em nossas toalhas.

Redução de risco de Infecções

Diminuição comprovada de carga microbiana de *Staphylococcus aureus*.

PARA A EQUIPE DE ENFERMAGEM

Economia de Tempo: Procedimentos de higiene podem consumir até 288 minutos de assistência - nossas toalhas reduzem drasticamente esse tempo.

Preferência dos Profissionais: Maior satisfação da equipe de enfermagem com o método de banho descartável.

Praticidade: Elimina a necessidade de preparar e processar materiais como compressas, toalhas convencionais, sabão e água.

PARA A INSTITUIÇÃO


Redução de Custos: Menor tempo de assistência significa melhor alocação de recursos humanos e recursos materiais (lavanderia para processamento de roupa, por exemplo).

Gestão Eficiente: Simplifica processos e padroniza o cuidado.

Praticidade: Contribui para a redução de infecções hospitalares ao diminuir a carga microbiana.

Nós Cuidamos de Cada Detalhe!

Siga o guia ilustrado em nossa embalagem para um banho no leito completo, seguindo a técnica céfalo-caudal preconizada pelos profissionais da saúde. Pensando no seu conforto, incluímos um lenço adicional para uso onde for necessário. Simples, prático e eficiente!

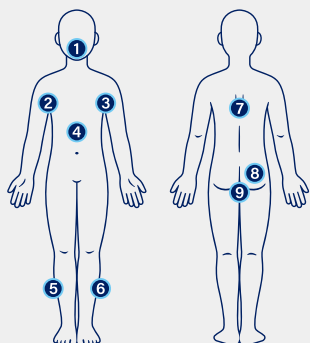

- | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 1
Face e
pescoço | 2
Braço e axila
esquerdos | 3
Braço e axila
direitos | 4
Abdômen e
tronco | 5
Perna e pé
esquerdos |
| 6
Perna e pé
direitos | 7
Costas/
Dorso | 8
Nádega | 9
Região
Íntima/Períneo | 10
Lenço extra p/
limpeza mais
detalhada |

MODO DE USAR:

1. Abra a etiqueta autoadesiva no local indicado. 2. Retire a toalha umedecida puxando-a pelo centro. 3. Feche a etiqueta autoadesiva entre um uso e outro para conservar a umidade do produto. 4. Passe a toalha umedecida delicadamente sobre a região a ser higienizada. 5. Após o uso, descarte a toalha umedecida no lixo. Nunca no vaso sanitário.

Nossa Tecnologia

Nossas toalhas descartáveis são desenvolvidas com tecnologia avançada, contendo solução emoliente e hidratante especialmente formulada para a limpeza eficaz da pele sem necessidade de sabão ou álcool. O material é suave, resistente e projetado para proporcionar conforto máximo ao paciente durante o procedimento.

COM DIMETICONA	VITAMINA E
COM EXTRATO DE ALGAS MARINHAS	COM EXTRATO DE ALOE VERA

DOBRADAS INDIVIDUALMENTE	SEM SULFATOS E PARABENOS	NÃO CONTÉM ÁLCOOL ETÍLICO
--------------------------	--------------------------	---------------------------

POR QUE ESCOLHER NOSSAS TOALHAS DE BANHO DESCARTÁVEIS?

A pesquisa científica é clara: o banho descartável é uma alternativa superior ao método tradicional para pacientes críticos, oferecendo:

- ✓ Maior segurança para o paciente
- ✓ Melhor eficiência para a equipe
- ✓ Redução de custos para a instituição
- ✓ Controle microbiano comprovado
- ✓ Preservação da integridade da pele

DEPOIMENTO DE ESPECIALISTA

"O estudo apresentado no EWMA 2025 sugere que o banho descartável é uma alternativa eficaz e confortável para a limpeza diária da pele de pacientes críticos, justificando sua incorporação nas rotinas de cuidados de enfermagem. Isso pode levar à melhoria da qualidade do atendimento, redução de custos e melhor gestão."

Camila Safranski

TRABALHO APRESENTANDO NA 35ª CONFERÊNCIA
EWMA ▪ GNEAUPP - 2025 EM BARCELONA - ES.



DISPOSABLE BATHING VS. TRADICIONAL BATHING IN CRITICALLY ILL PACIENTES:

Impact on microbial load, hemodynamics
and nursing workload.

The 35th Conference of the European Wound
Management Association In cooperation with
GNEAUPP – the Spanish Advisory Group for the
Study of Pressure Ulcers and Chronic Wounds.

Camila Safranski - R&D Missner

REFERÊNCIAS

Öz Ö, Uysal G, Düzkaya DS. Effect of Two Bathing Methods on Physiologic Parameters in Pediatric Intensive Care. *Clinical Nursing Research*. 2021;31(5):858-865. doi:10.1177/10547738211043337

1. Toledo LV, Salgado PO, Boscarol GT, Januário C de F, Brinati LM, Ercole FF. Efeitos oxi-hemodinâmicos de diferentes banhos no leito: ensaio clínico randomizado cruzado. *Acta paul enferm* [Internet]. 2022;35:eAPE02116. Available from: <https://doi.org/10.37689/acta-ape/2022AO021166>

Veje PL, Chen M, Jensen CS, Sørensen J, Primdahl J. Bed bath with soap and water or disposable wet wipes: Patients' experiences and preferences. *J Clin Nurs*. 2019;28:2235-2244.

Missner

Um toque de cuidado

Canal de *Vendas*



0800 047 0015



47 2111 0490

Visite

missner.ind.br



sac@missner.com.br

Rodovia BR-470, Km 54,6 N° 2870 - Salto do Norte
Blumenau / SC / BR - 89065-800