

CURATIVO LÍQUIDO HEMOSTÁTICO.

Descrição: Produto correlato médico hospitalar, classe II (conforme classificação da ANVISA). É apresentado na forma de spray,



não estéril. **Indicação:** Curativo Líquido Hemostático sem dor Derma Protect pode ser utilizado em pacientes adultos, crianças e bebês com idade superior a 01 mês que estejam com lesões de pele decorrentes de quedas, ralados, fricção ou cisalhamento. **Composição:** Disiloxane, Dimethicone, Cyclopentasiloxane (and) Dimethiconol, Trimethylsiloxysilicate, Laureth-2, Aqua, Calcium Chloride. **Condições de Armazenamento e Conservação:** Manter sempre em sua embalagem original, em local seco e temperatura ambiente. Não expor o produto à luz solar direta e umidade. **Precauções:** Evite contato com os olhos. Mantenha longe do alcance de crianças e animais domésticos. Em caso de irritação suspenda o uso. O uso do O Curativo Líquido Hemostático sem dor Derma Protect, deve ser indicado e acompanhado por um profissional habilitado. **Contraindicações:** Curativo Líquido Hemostático sem dor Derma Protect está contraindicado para pacientes que apresentam alergia a algum componente da fórmula. **Instruções de Uso:** **1.** A pele deve estar limpa e seca antes de aplicar o produto. **2.** Evite passar cremes ou óleos no local onde for aplicar o curativo líquido, isso impedirá o Curativo Líquido Hemostático de protegê-la. **3.** Borrife a uma distância de 10 centímetros da pele e aguarde a secagem. Repita por 3 vezes. A seguir, faça mesmo na região ao lado e assim por diante, até proteger toda a área desejada. **4.** Ao aplicar em área de dobras, como entre as nádegas, mantenha as partes separadas até o produto secar para depois retorná-las à posição inicial. **5.** Aguarde secar totalmente para colocar um curativo secundário. Reaplicar sempre que necessário. **Validade:** 02 anos a partir da data de fabricação. **Anvisa nº:** 80003309009. **Embalagem:** O produto se apresenta nas dimensões e nas quantidades conforme tabela abaixo:

CÓDIGO
PA. 1698

DESCRIÇÃO
Curativo Líquido Hemostático 28ml

APRESENTAÇÃO
Cartucho com 12 unidades

EAN
7896544927780