

LENÇO UMEDECIDO PELÍCULA PROTETORA SEM ARDOR DERMA PROTECT.

Descrição: Produto correlato médico hospitalar, classe II (conforme classificação da ANVISA), é apresentado na forma de lenço umedecido, não estéril. **Composição:** Disiloxane, Trimethylsiloxysilicate, Dimethicone (and) Dimethiconol, Dimethicone. **Indicação de uso:** O Derma Protect Película Protetora Sem Ardor, é um produto suave, podendo ser aplicado em pele hiperemida e/ou escoriada pois não causa ardor (não possui álcool), criando um filme sobre a pele prevenindo possíveis lesões ou

agravamento das mesmas decorrentes de incontinências urinárias e/ou fecais, sucos digestivos (ostomias), fricção, cisalhamento e agressões de adesivos devido trocas constantes de curativos, pode ser utilizada em pacientes adultos, crianças e bebês com idade superior a 01 mês. Não necessita ser retirado antes das reaplicações, como também não impede a aplicação de fraldas e não interfere em compressas absorventes. **Precauções:** O uso do produto, deve ser indicado e acompanhado por um profissional habilitado. Somente para uso externo. Evite contato com os olhos. Mantenha afastado de crianças e animais. **Condições de Armazenamento e Conservação:** Manter sempre em sua embalagem original, em local seco e temperatura ambiente. Não expor o produto à luz solar direta e umidade. **Advertências:** Produto de uso único. Em caso de irritação suspenda o uso e procure um profissional da saúde. Produto não estéril. É contraindicado para pacientes que apresentam alergia a algum componente da fórmula. **Modo de uso:** **1.** A pele deve estar limpa e seca antes de aplicar o produto. **2.** Evite passar cremes ou óleo no local onde for aplicar a película, isso impedirá a Película Protetora de protegê-la. **3.** Rasgue cuidadosamente a embalagem, removendo o lenço umedecido. **4.** Passe o lenço umedecido suavemente em toda a região que se deseja proteger, caso a região seja muito extensa, utilizar mais de um lenço umedecido para cobrir toda a área desejada. **5.** Ao aplicar em área de dobras, como entre as nádegas, mantenha as partes separadas até o produto secar para depois retorná-las à posição inicial. **6.** Aguarde secar totalmente para colocar a fralda, curativo, fitas ou bolsa de ostomia. **Validade:** 02 anos a partir da data de fabricação. **Registro Anvisa nº:** 80003309008. **Embalagem:** O produto se apresenta nas dimensões e nas quantidades conforme tabela abaixo:



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	EAN
PA.1488	Lenço Umedecido Película Protetora Sem Ardor Derma Protect	Cartucho com 30 unidades	7896544926653