

Produto: Curativo de Espuma Absorvente Com Bordas Adesivas M-TEC.



Descrição: O Curativo de espuma absorvente com bordas tem um adesivo de silicone macio perfurado que permite a passagem do exsudato para a camada de espuma absorvente evitando o excesso de fluido causando maceração em uma pele saudável, seu adesivo de silicone permite também a remoção indolor e atraumática da pele. Difere em ter uma borda de filme de poliuretano (PU) com adesivo de silicone, para que o curativo possa ser aplicado sem fita de fixação ou secundário.

Indicação: O curativo M-TEC Espuma Absorvente é indicado para feridas crônicas e agudas de moderada a alta exsudação. O curativo pode ser usado durante o processo de cicatrização na perna, lesão por pressão, úlceras de perna, úlceras do pé diabético, lacerações, abrasões, enxertos e áreas doadoras, feridas cirúrgicas pós operatórias, queimaduras de espessura superficial ou parcial e feridas profundas como curativo secundário. O Curativo M-TEC Espuma Absorvente é adequado para uso sobre bandagem por compressão. A versão sacral do curativo foi especialmente desenhada para se adaptar à anatomia da região sacral, sendo indicada para o tratamento de lesões por pressão nessa área.

Registro ANVISA N°: 80003300037.

Composição: Composto por uma camada adesiva de silicone, uma espuma hidrófila de poliuretano (PU), uma camada de distribuição não adesiva de fibras de viscose e poliéster, uma almofada de PE/PET altamente absorvente e um filme de barreira impermeável de poliuretano (PU), protegidos por um papel siliconizado. ISENTOS DE LÁTEX.


Condições de Armazenamento e Conservação: Manter em local limpo e ao abrigo da luz.

Precauções: Não reutilize o curativo, pois pode comprometer a esterilidade e/ou o desempenho do curativo. Não ingerir e manter afastado de crianças e animais. Para uso sob orientação de um profissional de saúde. Somente para uso externo. Em caso de irritação, descontinue o uso e procure

orientação médica. O curativo pode ser usado em feridas infectadas somente sob os cuidados de um profissional de saúde.

Advertências: Não use em indivíduos com uma sensibilidade conhecida para filmes ou espumas de poliuretano. Não use com soluções oxidantes, como hipoclorito ou peróxido de hidrogênio, pois podem danificar o componente absorvente de poliuretano do curativo. Produto de uso único. Destruir após o uso. Manter em local limpo e ao abrigo da luz.

Instruções de Uso:

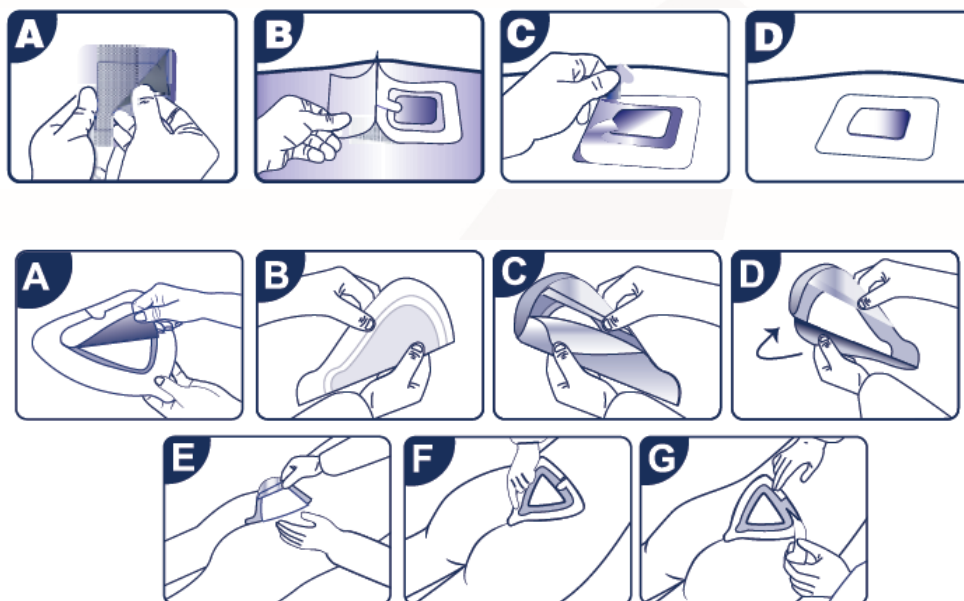

1. Irrigue o local da ferida de acordo com o protocolo padrão, se necessário, e seque a pele circundante antes de aplicar o curativo.
2. Selecione um tamanho do Curativo M-TEC Espuma Absorvente que é ligeiramente maior do que a ferida.
3. Centralize o curativo e aplique suavemente sobre o local da ferida (lado branco em contato com a ferida).
4. Pressione suavemente as bordas adesivas para garantir a fixação do curativo à pele. Caso seja utilizado sob uma bandagem por compressão, a própria bandagem manterá o curativo no lugar.
5. Descarte qualquer material remanescente do curativo devido ao risco de contaminação.

Troca e remoção do curativo:

1. O Curativo M-TEC Espuma Absorvente pode permanecer no local por até 7 dias, dependendo da condição do paciente e do nível de exsudato. Se houver necessidade de avaliação da ferida antes dos 7 dias, o curativo deve ser removido totalmente e trocado.
2. Remova cuidadosamente o curativo do leito da ferida e descarte-o. Descarte de acordo com os procedimentos e diretrizes locais.

3. Se necessário, limpe o local da ferida com produtos adequados para feridas antes da aplicação de um novo curativo.

Validade: 03 anos a partir da data de fabricação.

Produto Estéril por Óxido de Etileno. USO ÚNICO. PROIBIDO REPROCESSAR.

Apresentação / Embalagem: O produto se apresenta nas dimensões e embalagens conforme tabela abaixo:

DESCRIÇÃO DO ITEM	DIMENSÃO	EMBALAGEM PRIMÁRIA	EMBALAGEM SECUNDÁRIA	EMBALAGEM DE TRANSPORTE
Curativo Espuma Absorvente Silicone 10cmx10cm Cart C/ 10un	10 x 10cm	Envoltório de papel	Cartucho de papel cartão	Caixa de papelão
Curativo Espuma Absorvente Silicone 15cmx15cm Cart C/ 5un	15 x 15cm	Envoltório de papel	Cartucho de papel cartão	Caixa de papelão
Curativo Espuma Sacral Absorvente Silicone 5 Camadas 22cmx22cm Cart C/ 3un	22 x 22cm	Envoltório de papel	Cartucho de papel cartão	Caixa de papelão

Apresentação comercial:

Cód. Venda	Descrição do item	Curativos/Cartucho	Cód. Barras EAN 13	Cód. Barras EAN 13
			Envoltório	Cartucho
PA. 1723	Curativo Espuma Absorvente Silicone 10cmx10cm Cart C/ 10un	10	7896544928039	7896544927995
PA. 1724	Curativo Espuma Absorvente Silicone 15cmx15cm Cart C/ 5un	5	7896544928046	7896544928008
PA. 1732	Curativo Espuma Sacral Absorvente Silicone 5 Camadas 22cmx22cm Cart C/ 3un	3	7896544928053	7896544928060

Elaboração:	Data: __/__/__	Aprovação:	Data: __/__/__