

Produto: Curativo de PU Absorvente M-TEC.



Descrição: Curativo de filme de poliuretano (PU) com adesivo hipoalergênico e uma almofada absorvente central, protegidos por um papel siliconizado. Reduz risco de infecção por prevenir acúmulo de umidade. O Curativo de PU Absorvente M-TEC possui alta permeabilidade aos vapores de água, prevenindo o acúmulo de umidade embaixo do curativo, reduzindo o crescimento bacteriano e o risco de infecção relacionado ao cateter.

- Super fino e transparente.
- Almofada absorvente
- Fixação de curativos primários ou de baixa aderência
- Reduz riscos de infecção, pois o filme de poliuretano é à prova d'água, à prova de bactérias e à prova de vírus.
- Curativo respirável, evitando a maceração da pele.
- Adesivo sensível à pressão hipoalergênico, com boas propriedades de adesão e não deixa resíduos na remoção.
- O curativo possui sistema de aplicação estilo moldura para facilitar o manuseio.
- Macio e adaptável

Indicação: Indicado como curativo primário apenas para absorção e proteção de feridas de baixa a moderada exsudação ou cortes pequenos, ou abrasões. Pode ser usado também como curativo pós operatório para proteção de incisões cirúrgicas.

Registro ANVISA N°: 80003300029.

Composição: Composto por uma película de poliuretano (PU) transparente com uma camada adesiva acrílica hipoalergênica, uma almofada central não aderente de não tecido de viscosa, protegidos por um papel siliconizado. O curativo possui na parte externa uma camada de papel que atua como um sistema de fácil aplicação do filme (retirado assim que o curativo é aplicado). Isento de látex.

Condições de Armazenamento e Conservação: Manter em local limpo e ao abrigo da luz. Manter em temperatura entre 0°C e 40°C.

Precauções e Advertências: Não reutilize o curativo. Não ingerir e manter afastado de crianças e animais. Para uso sob orientação de um profissional de saúde. Somente para uso externo. Em caso de irritação, descontinue o uso e procure orientação médica. Não use em indivíduos com uma sensibilidade conhecida para filmes de poliuretano ou com sensibilidade a adesivos a base de acrilato. O curativo não deve ser usado em feridas com alto teor de exsudato, pois pode causar maceração do tecido. O curativo não deve ser usado em feridas de espessura total e queimaduras de terceiro grau. Pode ser aplicado em feridas infectadas somente sob supervisão médica. A pele deve estar limpa e seca antes da aplicação para garantir boa adesão.

Instruções de Uso:

1. Prepare o local de aplicação do produto, realizando desbridamento, tricotomia e limpeza, conforme instruções do protocolo da instituição;
2. Escolha o tamanho adequado para o procedimento a ser realizado;
3. Abra cuidadosamente a embalagem estéril;
4. Remova a película protetora sobre o visor do curativo;
5. Remova a película protetora da face adesiva do curativo;
6. Aplique o curativo sobre o local desejado, fazendo visualização por meio do visor, certifique-se de não estar esticando o curativo durante a aplicação;
7. Faça a remoção da última película protetora sobre a face adesiva do curativo;
8. Remova as bordas do curativo, fazendo leve pressão do centro às bordas o curativo, a fim de garantir total fixação do mesmo.



Validade: 05 anos a partir da data de fabricação.

Produto Estéril por Óxido de Etileno. USO ÚNICO. PROIBIDO REPROCESSAR.

Características da Qualidade:

Características	Métodos	Valores
<i>Adesão (180°) (N/25mm)</i>	<i>05-011</i>	<i>8±2</i>
<i>MVTR (g/m² / 24h)</i>	<i>05-050</i>	<i>800 - 900</i>

Apresentação / Embalagem: O produto se apresenta nas dimensões e embalagens conforme tabela abaixo:

Cód. Venda	DESCRIÇÃO DO ITEM	DIMENSÃO	EMBALAGEM PRIMÁRIA	EMBALAGEM SECUNDÁRIA	EMBALAGEM DE TRANSPORTE
PA.1418	Curativo de PU Absorvente 10cm x 10cm Cartucho c/100 UN	10cm x 10cm	Envoltório de papel	Cartucho de papel cartão	Caixa de papelão
PA.1726	Curativo de PU Absorvente 10cm x 10cm Cartucho c/20 UN	10cm x 10cm	Envoltório de papel	Cartucho de papel cartão	Caixa de papelão
PA.1728	Curativo de PU Absorvente 5cm x 7cm Cartucho c/20 UN	5cm x 7cm	Envoltório de papel	Cartucho de papel cartão	Caixa de papelão
PA.1730	Curativo de PU Absorvente 25cm x 10cm Cartucho c/20 UN	25cm x 10cm	Envoltório de papel	Cartucho de papel cartão	Caixa de papelão

Apresentação comercial:

Cód. Venda	Descrição do item	Un/ Cartucho	Cartucho/ Cx Papelão	Cód. Barras EAN 13	Cód. Barras DUN 14
				Cartucho	Caixa de Embarque
PA.1418	Curativo de PU Absorvente 10cm x 10cm Cartucho c/100 UN	100	8	7896544902718	17896544902715
PA.1726	Curativo de PU Absorvente 10cm x 10cm Cartucho c/20 UN	20	9	7896544927940	17896544927947
PA.1728	Curativo de PU Absorvente 5cm x 7cm Cartucho c/20 UN	20	9	7896544927964	17896544927961
PA.1730	Curativo de PU Absorvente 25cm x 10cm Cartucho c/20 UN	20	9	7896544927988	17896544927985

Elaboração:	Data: __/__/__	Aprovação:	Data: __/__/__