

**Produto:** Curativo Hidrocoloide para Acnes – Edição limitada: Copa do Mundo



**Descrição:** O Curativo Hidrocoloide para Acnes serve como uma barreira protetora para reduzir a exposição da acne e pequenos ferimentos aos meios externos e às contaminações. A tecnologia hidrocoloide funciona como secativo, absorvente as secreções, amenizando a vermelhidão e oleosidade da pele. O curativo Hidrocoloide para Acnes é permeável ao vapor de água, mas impermeável às secreções e aos microorganismos, por isso permite a troca gasosa da pele, auxilia na cicatrização e previne infecções.

**Indicação:** Proteção de acnes e pequenos ferimentos. Absorção de secreções, redução da vermelhidão e da oleosidade da pele. Produto para uso tópico e externo.

**Registro ANVISA N°:** 80003300051.

**Composição:** Copolímero de acetato de vinila e etileno, carmelose sódica, goma xantana, poliisobuteno e propileno glicol.

**Condições de Armazenamento e Conservação:** Manter em local limpo e ao abrigo da luz.

**Precauções:** Somente uso externo. Evite contato com os olhos. Mantenha longe do alcance de crianças e animais domésticos. Evite o uso em pessoas com histórico de reação alérgica a qualquer componente do produto. Em caso de irritação descontinue o uso e procure orientação médica.

**Advertências:** Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido reprocessar. Não compre se a embalagem estiver violada. Uso tópico para secar espinhas. Este produto não atua na causa raiz da oleosidade ou na prevenção da formação de novas espinhas.

#### **Instruções de Uso:**

1. Lave e seque as mãos e o local que será aplicado o curativo.
2. Retire o curativo da cartela evitando colocar as mãos na parte adesiva.
3. Aplique o curativo na região desejada e certifique-se que ele esteja bem aderido.

**Especificação de Produto**

Hidrocoloide para Acnes – Edição limitada: Copa do Mundo 12-068

Revisão N°.:00

Data Emissão: 10/03/26

Data Revisão:

Resp.: P&D

4. Recomenda-se manter o curativo por no mínimo 12h no local. Troque o curativo apenas quando ele começar a descolar sozinho. É normal o curativo adquira uma coloração esbranquiçada durante o uso, indicando a absorção das secreções.

**Validade:** 03 anos a partir da data de fabricação.

Produto Estéril por Irradiação Gama. USO ÚNICO. PROIBIDO REPROCESSAR.

**Apresentação / Embalagem:** O produto se apresenta nas dimensões e embalagens conforme tabela abaixo:

DESCRIÇÃO DO ITEM	DIMENSÃO	EMBALAGEM PRIMÁRIA	EMBALAGEM SECUNDÁRIA	EMBALAGEM DE TRANSPORTE
Curativo Hidrocoloide para Acnes Estrelas Verde e Amarelo	14 unidade de 12 mm + 10 unidades de 8 mm	Envoltório misto de plástico e papel	Cartucho de papel cartão	Caixa de papelão

**Apresentação comercial:**

Cód. Venda	Descrição do item	Curativos/Cartucho	Cód. Barras EAN 13
			Cartucho
PA. 1742	Hidrocoloide para Acnes Estrelas Verde e Amarelo cx c/ 25 cartuchos	1 cartela com 24 unidades de estrelas	7896544928640

Elaboração:	Data: __/__/__	Aprovação:	Data: __/__/__