

Produto: Generacell – Biocelulose Membrana Hidratada



Descrição: *Generacell® é uma membrana hidroativa de biocelulose biossintética, estéril e biocompatível, indicada como substituto temporário da pele no tratamento de queimaduras. Sua estrutura nanofibrilar mimetiza a matriz extracelular (MEC), promovendo ambiente úmido controlado, favorecendo a regeneração tecidual, reduzindo a dor e proporcionando remoção atraumática.*

Indicação: *Generacell® é indicada para: Tratamento de queimaduras de espessura superficial e parcial (superficial e profundo); Áreas doadoras de enxerto; Lesões com perda parcial de tecido; Feridas com baixa a média exsudação.*

Registro ANVISA N°: 80003300049.

Composição: celulose biossintética de alta pureza impregnada com solução fisiológica a 0,9%. Isenta de conservantes.

Condições de Armazenamento e Conservação: Manter em local limpo e ao abrigo da luz.

Precauções: Não reutilize o curativo, pois pode comprometer a esterilidade e/ou o desempenho do curativo. Não ingerir e manter afastado de crianças e animais.
Para uso sob orientação de um profissional de saúde. Em caso de irritação, descontinue o uso e procure orientação médica.

Advertências: Não use em indivíduos sensíveis ou que tenham tido reações alérgicas a um dos componentes do curativo. Não use como implante cirúrgico. Produto de uso único. Destruir após o uso.

Instruções de Uso:

1. Verificar se a embalagem se apresenta íntegra e dentro do prazo de validade do produto e da esterilização;
2. Limpar e secar cuidadosamente o local de aplicação da cobertura de acordo com as técnicas assépticas previamente preconizadas e em seguida, secar cuidadosamente as bordas da ferida com compressas esterilizadas. Se necessário, aplique medicamento;
3. Selecionar o curativo Generacell – Biocelulose Membrana Hidratada adequado ao procedimento a ser realizado;
4. Abrir cuidadosamente a embalagem estéril e retirar o filme de proteção do curativo;
5. Aplicar o curativo sobre a ferida e adapte a forma do mesmo.
6. Em função do grau de exsudato aplica-se um curativo secundário adequado: Filme transparente rolo M-TEC ou Curativo de Espuma Absorvente M-TEC;

Troca e Remoção do Curativo

1. O Generacell – Biocelulose Membrana Hidratada pode permanecer no local por até 7 dias, dependendo da condição do paciente, do nível de exsudato e das indicações do médico;
2. Reaplicar Generacell – Biocelulose Membrana Hidratada quando o curativo secundário atingiu sua capacidade absorvente ou sempre que uma boa prática de cuidados da ferida for necessária.
3. Para reaplicar, remova suavemente o curativo secundário. Se a ferida parecer seca, saturar o curativo com solução salina estéril antes da remoção.
4. Remova gentilmente o Generacell – Biocelulose Membrana Hidratada do leito da ferida pelas bordas e descarte de acordo com os procedimentos e diretrizes locais.
5. Se necessário, irrigar e limpar o local da ferida com um limpador de feridas adequado antes da aplicação de um novo curativo.

Validade: 02 anos a partir da data de fabricação.

Produto Estéril por Irradiação Gama. USO ÚNICO. PROIBIDO REPROCESSAR.

Apresentação / Embalagem: O produto se apresenta nas dimensões e embalagens conforme tabela abaixo:

DESCRIÇÃO DO ITEM	DIMENSÃO	EMBALAGEM PRIMÁRIA	EMBALAGEM SECUNDÁRIA	EMBALAGEM DE TRANSPORTE
Generacell Biocelulose Membrana Hidratada 10cm x 10cm 5un por Cartucho	10 x 10cm	Envoltório de alumínio	Cartucho de papel cartão	Caixa de papelão

Generacell Biocelulose Membrana Hidratada 15cm x 20cm 2un por Cartucho	15 x 20cm	Envoltório de alumínio	Cartucho de papel cartão	Caixa de papelão
---	------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------

Apresentação comercial:

Cód. Venda	Descrição do item	Curativos/Cartucho	Cód. Barras EAN 13
			Cartucho
PA. 1499	Generacell Biocelulose Membrana Hidratada 10cm x 10cm 5un Por Cartucho	5	7896544926653
PA. 1743	Generacell Biocelulose Membrana Hidratada 15cm x 20cm 2un Por Cartucho	2	7896544928510

Elaboração:	Data: __/__/__	Aprovação:	Data: __/__/__