

Produto: Curativo Alginato de Cálcio e Sódio e Prata M-TEC



Descrição: produto correlato médico hospitalar, classe III (conforme classificação da ANVISA). É apresentado na forma de curativos em placa ou tiras, estéril óxido de etileno. **O Curativo de Alginato de Cálcio e Prata é macio, conformável à pele e altamente absorvente.**

Indicação: O Curativo de Alginato de Cálcio e Prata Missner é indicado para uso nas feridas de moderada a alta exsudação e cavidades com espessuras parciais a profundas, tais como: Feridas pós-operatórias; Feridas por trauma (lesões dérmicas, lesões traumáticas ou incisões); Úlceras de perna; Lesão por pressão; Úlceras do pé diabético; Locais de enxertos e doadores; Feridas de cavidade; Queimaduras de espessura superficial e parcial. O Curativo de Alginato de Cálcio e Prata M-TEC é indicado apenas para uso externo.

Registro ANVISA Nº: 80003300015.

Composição: composto por fibras de alginato de cálcio, sódio, carboximetilcelulose (CMC) e 2,0% de prata iônica. Isento de Látex.

Condições de Armazenamento e Conservação: Manter em local limpo e ao abrigo da luz.

Precauções: Não reutilize o curativo, pois pode comprometer a esterilidade e / ou o desempenho do curativo. Não ingerir e manter afastado de crianças e animais. Para uso sob orientação de um profissional de saúde. Somente para uso externo. Em caso de irritação, descontinue o uso e procure orientação médica.

Advertências: Não use em indivíduos com uma sensibilidade conhecida à alginatos. Não use como implante cirúrgico. Produto de uso único. Destruir após o uso. Manter em local limpo e ao abrigo da luz.

INSTRUÇÕES DE USO

1. Desbridar quando necessário e irrigar o local da ferida de acordo com os protocolos padrões.

- 2. Remova o excesso de solução da pele circundante à ferida;**
- 3. Selecione um tamanho de Curativo M-TEC Alginato de Cálcio e Prata que é ligeiramente maior do que a ferida.**
- 4. Corte (usando tesoura esterilizada) ou dobre o curativo para encaixar a ferida. Aplique diretamente no leito da ferida.**
- 5. Para feridas de cavidades, preencha livremente assegurando que o curativo não se sobreponha às margens da ferida.**
- 6. Cobrir e proteger com um curativo secundário não oclusivo ou semi-oclusivo, por exemplo Curativo M-TEC Hidrocoloide ou Curativo M-TEC Espuma Absorvente com borda adesiva.**

TROCA E REMOÇÃO DO CURATIVO

- 1. O Curativo M-TEC Alginato de Cálcio e Prata pode permanecer no local por até 7 dias, dependendo da condição do paciente e do nível do exsudato. Inicialmente, pode ser necessário mudar o curativo a cada 24 horas.**
- 2. Reaplicar o Curativo M-TEC Alginato de Cálcio e Prata quando o curativo secundário atingir sua capacidade absorvente ou sempre que uma boa prática de cuidados da ferida for necessária.**
- 3. Para reaplicar, remova suavemente o curativo secundário. Se a ferida parecer seca, saturar o curativo secundário com solução salina estéril antes da remoção.**
- 4. Remova gentilmente o curativo de alginato de cálcio do leito da ferida e descarte de acordo com os procedimentos e diretrizes locais.**
- 5. Se necessário, irrigar o local da ferida com um limpador de feridas adequado antes da aplicação de um novo curativo.**

OBS.: Se a ferida continuar infectada por um período muito longo, deve ser iniciado um tratamento médico adequado. A aplicação do Curativo M-TEC Alginato de Cálcio e Prata pode ser continuado a critério do médico assistente/clínico.

Validade: 05 anos a partir da data de fabricação.

Produto Estéril por Óxido de Etileno. USO ÚNICO. PROIBIDO REPROCESSAR.

Apresentação / Embalagem: O produto se apresenta nas dimensões e embalagens conforme tabela abaixo:

DESCRIÇÃO DO ITEM	DIMENSÃO	EMBALAGEM PRIMÁRIA	EMBALAGEM SECUNDÁRIA	EMBALAGEM DE TRANSPORTE
Curativo Alginato de Calcio e Prata 10cmx10cm Cart C/10un	10 x 10 cm	Envoltório de papel	Cartucho de papel cartão	Caixa de papelão
Curativo Alginato de Calcio e Prata Fita 2cmx30cm C/ 5un	2 x 30 cm	Envoltório de papel	Cartucho de papel cartão	Caixa de papelão

Apresentação comercial:

Cód. Venda	Descrição do item	Curativos/Cartucho	Cód. Barras EAN 13	Cód. Barras EAN 13
			Envoltório	Cartucho
PA. 0896	Curativo Alginato de Calcio e Prata 10cmx10cm Cart C/10un	10	7896544901803	7896544901810
PA.1453	Curativo Alginato de Calcio e Prata Fita 2cmx30cm C/ 5un	5	7896544925632	7896544925625

Elaboração:	Data: __/__/__	Aprovação:	Data: __/__/__
Jaqueline Schlemper		Dionei Neves	