

Precauções: Proibido reprocessar, pois pode comprometer a esterilidade e/ou o desempenho do curativo. Não ingerir, manter afastado de crianças e animais. Para uso sob orientação de um profissional de saúde. Em caso de irritação, descontinue o uso e procure orientação médica. Indicado apenas para uso externo.



CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO E PRATA M-TEC.

Descrição: Produto correlato médico hospitalar, classe III (conforme classificação da ANVISA). É apresentado na forma de curativos em placa ou tiras, estéril óxido de etileno.

Composição: Composto por um alto teor de alginato de cálcio (ácido gulurônico (G) e ácido manurônico) e sódio, carboximetilcelulose (CMC) e complexo de prata iônica (Carbonato de Prata), que libera íons de prata na presença de líquido na ferida. Isento de látex.

Indicação de uso: É indicado para uso nas feridas de moderada a alta exsudação e cavidades com espessuras parciais a profundas, feridas pós-operatórias; feridas por trauma (lesões dérmicas, lesões traumáticas ou incisões); úlceras nas pernas; úlceras por pressão; úlceras diabéticas; locais de enxertos e doadores; feridas de cavidade; queimaduras de espessura superficial e parcial. Contém alginato, podendo ajudar a apoiar o controle de sangramento menor em feridas superficiais. Pode ser usado sob bandagens de compressão. Pode ser usado no tratamento de feridas infectadas ou não em que haja um risco aumentado de infecção sob a supervisão médica de um profissional de saúde.

Advertências: Uso único. Não use em indivíduos com uma sensibilidade conhecida à alginatos. Não use como implante cirúrgico. Destruir após o uso. Manter em local limpo e ao abrigo da luz. Aconselhável manter em temperatura abaixo de 25°C.

Validade: 05 anos a partir da data de fabricação.

Cadastro Anvisa Nº: 80003300015

Embalagem: O produto se apresenta nas dimensões e nas quantidades conforme tabela abaixo:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	EAN
PA. 0896	Curativo de Alginato de Cálcio e Prata M-Tec 10cm x 10cm	10 unidades	7896544901803
PA. 1453	Curativo de Alginato de Cálcio e Prata M-Tec 2cm x 30m (Fita)	Cartucho com 5 unidades	7896544925625