

Produto: Curativos Alginato de Cálcio e Sódio M-TEC.



Descrição: produto correlato médico hospitalar, classe III (conforme classificação da ANVISA). É apresentado na forma de curativos em placa ou tiras, estéril por óxido de etileno.

Indicação: *O Curativo M-TEC Alginato de Cálcio é indicado para as seguintes feridas crônicas e agudas de moderadas a alta exsudação: Lesão por pressão; Úlceras de perna; Úlceras do pé diabético; feridas de cavidade; Lacerações; Abrasões cutâneas; locais de enxertos e doadores; Feridas pós-operatórias; feridas por trauma (lesões dérmicas, lesões traumáticas ou incisões); Queimaduras de espessura superficial e parcial.*

O Curativo M-TEC Alginato de Cálcio também pode ser usado para controlar sangramentos menores em feridas superficiais.

Registro ANVISA Nº: 80003300014.

Composição: composto por um alto teor de alginato (Ascophyllum nodosum, conhecido como alga marrom, faz parte da família Fucaceae, como a Alga laminaria) de cálcio (ácido gulurônico (G) e ácido manurônico) e sódio. Isento de látex.

Condições de Armazenamento e Conservação: Manter em local limpo e ao abrigo da luz. Aconselhável manter em temperatura abaixo de 25°C.

Precauções: Não reutilize o curativo, pois pode comprometer a esterilidade e / ou o desempenho do curativo. Não ingerir e manter afastado de crianças e animais.

Para uso sob orientação de um profissional de saúde. Somente para uso externo. Em caso de irritação, descontinue o uso e procure orientação médica.

Advertências: não é indicado para controlar sangramentos intensos. Não use em indivíduos com uma sensibilidade conhecida à alginatos. Não use como implante cirúrgico. Não utilize este curativo sozinho para combater feridas infectadas, ele não possui ação antimicrobiana. Destruir após o uso.

Instruções de Uso:

1. Desbridar quando necessário e irrigar o local da ferida de acordo com os protocolos padrões.

- 2. Remova o excesso de solução da pele circundante à ferida;**
- 3. Selecione um tamanho de Curativo M-TEC Alginato de Cálcio que é ligeiramente maior do que a ferida.**
- 4. Corte (usando tesoura esterilizada) ou dobre o curativo para encaixar a ferida. Aplique diretamente no leito da ferida.**
- 5. Para feridas de cavidades, preencha livremente assegurando que o curativo não se sobreponha às margens da ferida.**
- 6. Cobrir e proteger com um curativo secundário não oclusivo ou semi-oclusivo, por exemplo Curativo M-TEC Hidrocoloide ou Curativo M-TEC Espuma Absorvente com borda adesiva.**

Troca e Remoção do Curativo

- 1. O Curativo M-TEC Alginato de Cálcio pode permanecer no local por até 7 dias, dependendo da condição do paciente e do nível do exsudato. Inicialmente, pode ser necessário mudar o curativo a cada 24 horas.**
- 2. Reaplicar o Curativo M-TEC Alginato de Cálcio quando o curativo secundário atingir sua capacidade absorvente ou sempre que uma boa prática de cuidados da ferida for necessária.**
- 3. Para reaplicar, remova suavemente o curativo secundário. Se a ferida parecer seca, saturar o curativo secundário com solução salina estéril antes da remoção.**
- 4. Remova gentilmente o curativo de alginato de cálcio do leito da ferida e descarte de acordo com os procedimentos e diretrizes locais.**
- 5. Se necessário, irrigar o local da ferida com um limpador de feridas adequado antes da aplicação de um novo curativo.**

Validade: 03 anos a partir da data de fabricação.

Produto Estéril por Óxido de Etileno. USO ÚNICO. PROIBIDO REPROCESSAR.

Apresentação / Embalagem: O produto se apresenta nas dimensões e embalagens conforme tabela abaixo:

DESCRIÇÃO DO ITEM	DIMENSÃO	EMBALAGEM PRIMÁRIA	EMBALAGEM SECUNDÁRIA	EMBALAGEM DE TRANSPORTE
Curativo de Alginato de Cálcio M-TEC 10cm x 10cm	10 x 10cm	Envoltório de papel	Cartucho de papel cartão	Caixa de papelão

Apresentação comercial:

Cód. Venda	Descrição do item	Curativos/Cartucho	Cód. Barras EAN 13	Cód. Barras EAN 13
			Envoltório	Cartucho
PA.0897	Curativo de Alginato de Cálcio M-TEC 10cm x 10cm	10	7896544901780	7896544901797

Elaboração: Jaqueline Schlemper	Data: __/__/__	Aprovação: Dionei Neves	Data: __/__/__