



## CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO M-TEC.

**Descrição:** Produto correlato médico hospitalar, classe III (conforme classificação da ANVISA). É apresentado na forma de curativos em placa ou tiras, estéril por óxido de etileno. **Composição:** Composto por um alto teor de alginato (*Ascophyllum nodosum*, conhecido como alga marrom, faz parte da família *Fucaceae*, como a Alga laminaria) de cálcio (ácido gulurônico (G) e ácido manurônico) e sódio, carboximetilcelulose (CMC). Isento de látex. **Indicação de uso:** O Curativo de Alginato de Cálcio e Sódio M-Tec é indicado para as seguintes feridas crônicas e agudas de moderadas a alta exsudação: úlceras por pressão, úlceras venosas e arteriais, úlceras diabéticas, feridas de cavidade, lacerações, abrasões cutâneas, locais de enxertos e doadores, feridas cirúrgicas pós-operatórias, queimaduras de espessura superficial e parcial. O Curativo de Alginato de Cálcio e Sódio M-Tec também pode ser usado para controlar sangramentos menores em feridas superficiais. **Precauções:** Não reutilize o curativo, pois pode comprometer a esterilidade e/ou o desempenho do curativo. Não ingerir e manter afastado de crianças e animais. Para uso sob orientação de um profissional de saúde. Somente para uso externo. Em caso de irritação, descontinue o uso e procure orientação médica. **Condições de Armazenamento e Conservação:** Manter em local limpo e ao abrigo da luz. Aconselhável manter em temperatura abaixo de 25°C. **Advertências:** Não é indicado para controlar sangramentos intensos. Não use em indivíduos com uma sensibilidade conhecida à alginatos. Não use como implante cirúrgico. Não utilize este curativo sozinho para combater feridas infectadas, ele não possui ação antimicrobiana. Destruir após o uso. Manter em local limpo e ao abrigo da luz. **Apresentações:** Cartucho com 10 unidades, embalados individualmente, no tamanho de 10cm x 10cm. **Validade:** 03 anos a partir da data de fabricação. **Cadastro Anvisa N°:** 80003300014. **Embalagem:** O produto se apresenta nas dimensões e nas quantidades conforme tabela abaixo:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	EAN
PA.0897	Curativo de Alginato de Cálcio M-Tec 10cm x 10cm	10 unidades	7896544900363