



CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO M-TEC.

Descrição: Produto correlato médico hospitalar, classe III (conforme classificação da ANVISA). É apresentado na forma de curativos em placa ou tiras, estéril por óxido de etileno.

Composição: Composto por um alto teor de alginato de cálcio (ácido gulurônico (G) e ácido manurônico) e sódio, carboximetilcelulose (CMC). Isento de látex.

Indicação de uso: É indicado para as seguintes feridas crônicas e agudas de moderadas a alta exsudação: úlceras por pressão, úlceras venosas e arteriais, úlceras diabéticas, feridas de cavidade, lacerações, abrasões cutâneas, locais de enxertos e doadores, feridas cirúrgicas pós-operatórias, queimaduras de espessura superficial e parcial. O Curativo de Alginato de Cálcio M-Tec também pode ser usado para controlar sangramentos menores em feridas superficiais.

Precauções: Não reutilize o curativo, pois pode comprometer a esterilidade e/ou o desempenho do curativo. Não ingerir e manter afastado de crianças e animais. Para uso sob orientação de um profissional de saúde. Somente para uso externo. Em caso de irritação, descontinue o uso e procure orientação médica.

Advertências: Não é indicado para controlar sangramentos intensos. Não use em indivíduos com uma sensibilidade conhecida à alginatos. Não use como implante cirúrgico. Não utilize este curativo sozinho para combater feridas infectadas, ele não possui ação antimicrobiana. Destruir após o uso. Manter em local limpo e ao abrigo da luz. Aconselhável manter em temperatura abaixo de 25°C.

Validade: 3 anos a partir da data de fabricação.

Cadastro Anvisa Nº: 80003300027

Embalagem: O produto se apresenta nas dimensões e nas quantidades conforme tabela abaixo:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	EAN
PA.0897	Curativo de Alginato de Cálcio M-Tec 10cm x 10cm	10 unidades	7896544900363