

SPRAY PELÍCULA PROTETORA DERMA PROTECT

Descrição: Produto correlato médico hospitalar, classe II (conforme classificação da ANVISA). É apresentado na forma

despray, não estéril. **Indicações:** Produto indicado para utilizar em pacientes adultos, crianças e bebês com idade superior a 1 mês que estejam com lesões de pele decorrentes de incontinências urinárias e/ou fecais, sucos digestivos (ostomias), fricção, cisalhamento e agressões de adesivos devido trocas constantes de curativos. Rendendo aproximadamente 180 borrifadas e deve ser aplicado de 12h em 12h. A secagem de 3 borrifadas do Spray Película Protetora - Derma Protect acontece entre 30s e 40s, caso seja aplicada 2 camadas, aguarde a primeira secar totalmente antes de aplicar a segunda. **Composição:** Hexametildisiloxano, trimetilsiloxilicato, ciclopenta-siloxano, dimeticone, polydimethylsiloxane. **Condições de Armazenamento e Conservação:** Manter o produto ao abrigo da luz, umidade e em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C). **Precauções:** O uso do Spray Película Protetora - Derma Protect deve ser indicado e acompanhado por um profissional habilitado. Produto não estéril. Produto inflâmavel. **Contraindicações:** Está contraindicado para pacientes que apresentam alergia a algum componente da fórmula. **Efeitos Adversos à Saúde Humana:** Em caso de irritação suspender o uso. **Olhos:** Pode causar irritação significativa. **Pele:** Não irritante para pele. **Inalação:** Pode causar irritação nasal e nas membranas da mucosa. **Ingestão:** Pode causar náusear, vômito, irritação gastrointestinal. **Modo de uso:** **1.** A pele deve estar limpa e seca antes de aplicar o produto. **2.** Evite passar cremes ou óleos no local onde for aplicar a película, isso impedirá o Spray Película Protetora - Derma Protect de protegê-la. **3.** Borrife a uma distância de 10 centímetros da pele. A seguir, faça o mesmo na região ao lado e assim por diante, até proteger toda a área desejada. **4.** Ao aplicar em área de dobras, como entre as nádegas, mantenha as partes separadas até o produto secar para depois retorná-las à posição inicial. **5.** Aguarde secar totalmente para colocar a fralda ou colocar um curativo, fitas ou bolsa de ostomia. **Apresentações:** Um frasco contendo 28ml do produto. **Validade:** 02 anos a partir da data de fabricação. **Cadastro Anvisa N°:** 80003309008. **Embalagem:** O produto pode ser vendido nas seguintes versões conforme tabela abaixo:



CÓDIGO

PA. 1336

PA. 0944

DESCRIÇÃO

Spray Película Protetora - Derma Protect 28ml

Spray Película Protetora - Derma Protect 28ml (Display 6 un)

APRESENTAÇÃO

Caixa 20 unidades

Caixa 12 unidades

EAN

7896544902787

7896544926547