

CURATIVO HIDROCOLOIDE EM PASTA M-TEC.

Descrição: O Curativo de Hidrocoloide em Pasta M-TEC é composto de hidrocoloides naturais (goma xantana, goma guar, pectina e carboximetilcelulose sódica), óleo vegetal e glicerina. Que fazem com que o produto interaja com o exsudato da ferida formando um meio úmido favorecendo o processo de cicatrização, propiciando o desbridamento autolítico e permitindo a remoção não traumática do curativo, sem danificar os tecidos recém-formados. **Composição:** Caprylic/Capric Triglyceride, Quaternium - 18 Bentonite, Propylene Carbonate, Pectina, Água Purificada, Carboximetilcelulose Sódica, Goma Xantana, Goma Guar, Polibuteno, Glicerina, Óleo de Girassol Ozonizado e Conservantes. **Indicação de uso:** O Curativo Hidrocoloide em Pasta M-TEC é indicado para uso no tratamento de úlceras de pele exsudativas, juntamente com os curativos secundários, incluindo

feridas profundas como úlceras de perna, lesões por pressão e úlceras do pé diabético. Usada desta maneira, ela contribui para prolongar a utilização do curativo. Além de em estomas a pasta preenche as cavidades/pregas na pele intacta à volta do estoma. Desse modo, o espaço entre o estoma e a placa de base é selado, o que protege a pele contra os fluidos do estoma. **Precauções: USO ÚNICO. PROIBIDO REPROCESSAR.** A utilização inicial deste produto para o tratamento de úlceras de pele deverá ser feita sob supervisão de um profissional da saúde. A utilização de qualquer curativo oclusivo na presença de material necrótico pode aumentar a extensão e profundidade da ferida durante a fase inicial do tratamento devido à eliminação de restos necróticos. Esta deterioração aparente é acompanhada de uma melhora progressiva. Em alguns casos, debaixo de uma úlcera de pressão aparentemente superficial pode haver dano tissular profundo. A piora inicial que frequentemente ocorre nestes casos pode parecer traumática, porém não constitui contra-indicação de uso do Curativo de Hidrocoloide em Pasta M-Tec. Em feridas crônicas é comum ocorrer infecção e o uso de curativos oclusivos não é contra-indicado nestes casos. Os curativos oclusivos podem ser utilizados sob supervisão médica, terapia antibacteriana adequada e frequente monitorização da ferida. A utilização de curativos oclusivos pode provocar o desenvolvimento de tecido de granulação em excesso. **Contraindicações:** Não use em indivíduos sensíveis ou que tiveram reações alérgicas a um dos componentes do curativo. Não use como implante cirúrgico. Produto de uso único. Destruir após o uso. **Instruções de uso:** Vide folheto de instruções de uso. **Validade:** 03 anos a partir da data de fabricação. **Registro Anvisa Nº:** 80003300044. **Embalagem:** O produto se apresenta nas dimensões e nas quantidades conforme tabela abaixo:



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	EAN
PA. 1463	Curativo Hidrocoloide em Pasta 60g	1 unidade	7896544926806