

CURATIVO HIDROFIBRA EXTRA M-TEC.

Descrição: Possui capacidade gelificante que absorve e retém exsudato dentro da sua estrutura. O Curativo Hidrofibra Extra M-TEC é composto por fibras de CMC e possui fios de reforço que conferem ao curativo alta resistência e garante uma remoção intacta. O Curativo Hidrofibra Extra M-TEC é ideal para o tratamento de feridas sob a supervisão médica de um profissional da saúde. **Composição:** Composto por fibras de carboximetilcelulose e fios poliéster como reforço. Isento de látex. **Indicação de uso:** É indicado para uso nas feridas crônicas e agudas, de moderada a alta exsudação, e cavidades com espessuras parciais a profundas, tais como: Úlceras nas pernas; Lesão por pressão; Úlceras do pé diabéticas; Feridas pós-operatórias; Queimaduras de espessura parcial; Feridas por trauma (lesões dérmicas, lesões traumáticas ou incisões); Locais de enxertos e doadores; Absorção de exsudato de feridas oncológicas (tumores cutâneos, metástases cutâneas e sarcomas de Kaposi). O Curativo Hidrofibra Extra M-TEC também pode ser usado para controlar sangramentos menores em feridas superficiais. O Curativo Hidrofibra Extra M-TEC é adequado para uso sob bandagem por compressão. **Precauções: Produto Estéril por Óxido de Etileno. USO ÚNICO. PROIBIDO REPROCESSAR.** Não reutilize o curativo, pois pode comprometer a esterilidade e/ou o desempenho do curativo. Não ingerir e manter afastado de crianças e animais. Para uso sob orientação de um profissional de saúde.

Em caso de irritação, descontinue o uso e procure orientação médica. **Contraindicações:** Não use em indivíduos sensíveis ou que tenham tido reações alérgicas a um dos componentes do curativo. Não use como implante cirúrgico. Produto de uso único. Destruir após o uso. **Instruções de uso:** **1.** Faça a desinfecção inicial das mãos antes de manipular o curativo. **2.** Limpe a ferida de acordo com os protocolos padrão. **3.** Selecione um tamanho de Curativo Hidrofibra Extra M-TEC que é ligeiramente maior que a ferida. **4.** Corte (usando tesoura esterilizada) ou dobre o curativo para encaixar a ferida. Aplique diretamente no leito da ferida. **5.** Para feridas de cavidade, preencha livremente assegurando que o curativo não se sobreponha às margens da ferida. Deixe pelo menos 2,5 cm do curativo fora da ferida. **6.** Cobrir e proteger com um curativo secundário não oclusivo ou semi-oclusivo, por exemplo Curativo Hidrocoloide M-TEC ou Curativo de Espuma Absorvente com borda adesiva M-TEC. OBS: Para feridas infectadas recomenda-se o uso do Curativo Hidrofibra Extra M-TEC combinado a um agente antimicrobiano. **Troca e Remoção do Curativo:** **1.** O Curativo Hidrofibra Extra M-TEC pode permanecer no local por até 7 dias, dependendo da condição do paciente e do nível de exsudato. Inicialmente pode ser necessário mudar o curativo a cada 24 horas. **2.** Reaplicar Curativo Hidrofibra Extra M-TEC quando o curativo secundário atingiu sua capacidade absorvente ou sempre que uma boa prática de cuidados da ferida for necessária. **3.** Para reaplicar, remova suavemente o curativo secundário. Se a ferida parecer seca, saturar o curativo com solução salina estéril antes da remoção. **4.** Remova gentilmente o Curativo Hidrofibra Extra M-TEC do leito da ferida e descarte de acordo com os procedimentos e diretrizes locais. **Validade:** 05 anos a partir da data de fabricação. **Registro Anvisa Nº:** 80003309014. **Embalagem:** O produto se apresenta nas dimensões e nas quantidades conforme tabela abaixo:



CÓDIGO

PA.1467

DESCRIÇÃO

Curativo Hidrofibra Extra 10cm X 10cm

APRESENTAÇÃO

Cartucho com 10 unidades

EAN

7896544926639

