


CURATIVO DE PU FILME TRANSPARENTE EM ROLO M-TEC.

Consiste em um filme de poliuretano não estéril, coberto por um adesivo hipoalergênico transparente. Pode ser usado na prevenção de infecções e proteção de tatuagens recentes. O produto é permeável a vapores, permitindo trocas gasosas e é impermeável a água e bactérias, atuando como barreira de proteção para a pele.

- Super fino e transparente.
- Fixação de Curativos Primários ou de baixa aderência.
- Fixação de cateteres e drenos.
- Fixação de Bolsas de perna e dispositivos de estoma.
- Reduz riscos de infecção, pois o filme de poliuretano é à prova d'água, à prova de bactérias e à prova de vírus.
- Transparente: possibilita a visualização do local da punção do I.V.

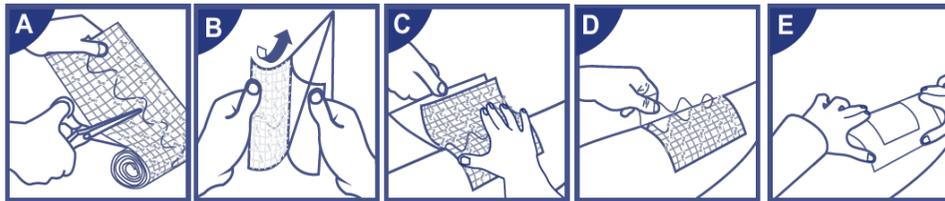

- Curativo respirável, evitando a maceração da pele.
- Adesivo sensível à pressão hipoalergênico, com boas propriedades de adesão e não deixa resíduos na remoção.
- O curativo possui sistema de aplicação estilo moldura para facilitar o manuseio.
- Macio e adaptável.

Composição: Composto por uma película de poliuretano (PU) transparente com uma camada adesiva acrílica hipoalergênica, protegido por um papel siliconizado. Possui um papel na parte superior que permite a fácil aplicação do filme transparente. Isento de látex. **Indicação de uso:** Fixação e cobertura de curativos primários; Cobertura de suturas; Fixação de tubos, drenos e bolsas de perna; Proteção de proeminências ósseas (calcâneo, cotovelo, joelho, região sacra, trocanteriana); Cobertura protetora da pele; Proteção de tatuagens (usar somente depois do fim da fase exsudativa). **Advertências:** Não reutilize o curativo. Não ingerir e manter afastado de crianças e animais. Para uso sob orientação de um profissional de saúde. Somente para uso externo. Em caso de irritação, descontinue o uso e procure orientação médica. **Condições de Armazenamento e Conservação:** Manter em local limpo e ao abrigo da luz. Manter em temperatura entre 0°C e 40°C. Produto Estéril por Óxido de etileno. USO ÚNICO. PROIBIDO REPROCESSAR. **Validade:** 05 anos a partir da data de fabricação. **Cadastro Anvisa N°:** 80003300030. **Instruções de Uso:** 1. A pele deve estar limpa e seca; 2. Cortar o Filme Transparente no tamanho desejado; 3. Destacar uma das laterais do papel protetor do adesivo e aplicar sobre o local/pele; 4. Remover a outra lateral do papel de proteção do adesivo e posicionar sobre o local/pele; 5. Pressionar gentilmente as bordas para fixação e a parte central, massageando sobre o papel superior (quadriculado); 6. Remova o papel superior. **Embalagem:** O produto se apresenta nas dimensões e nas quantidades conforme tabela abaixo:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	EAN
PA. 1415	Curativo de PU Filme Transparente em Rolo M-Tec 10cm x 10cm	caixa 1 unidade	7896544902725
PA. 1482	Curativo de PU Filme Transparente em Rolo M-Tec 15cm x 10cm	caixa 1 unidade	7896544926523