

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

Curativos Alginato de Cálcio M-TEC

Descrição: produto correlato médico hospitalar, classe III (conforme classificação da ANVISA). É apresentado na forma de curativos em placa ou tiras, estéril por óxido de etileno.

Composição: composto por fibras de alginato de sódio e cloreto de cálcio e sódio. Isento de látex.

Indicação de uso: o Curativo de Alginato de Cálcio M-Tec é indicado para as seguintes feridas crônicas e agudas de moderadas a alta exsudação: úlceras por pressão, úlceras venosas e arteriais, úlceras diabéticas, feridas de cavidade, lacerações, abrasões cutâneas, locais de enxertos e doadores, feridas cirúrgicas pós-operatórias, queimaduras de espessura superficial e parcial. O Curativo de Alginato de Cálcio M-Tec também pode ser usado para controlar sangramentos menores em feridas superficiais.

Precauções: Não reutilize o curativo, pois pode comprometer a esterilidade e / ou o desempenho do curativo. Não ingerir e manter afastado de crianças e animais. Para uso sob orientação de um profissional de saúde. Somente para uso externo. Em caso de irritação, descontinue o uso e procure orientação médica.

Condições de Armazenamento e Conservação: Manter em local limpo e ao abrigo da luz. Aconselhável manter em temperatura abaixo de 25°C.

Advertências: não é indicado para controlar sangramentos intensos. Não use em indivíduos com uma sensibilidade conhecida à alginatos. Não use como implante cirúrgico.

Não utilize este curativo sozinho para combater feridas infectadas, ele não possui ação antimicrobiana. Destruir após o uso. Manter em local limpo e ao abrigo da luz. Aconselhável manter em temperatura abaixo de 25°C.

Modo de uso: vide folheto de instruções de uso em Anexo.

Validade: 03 anos a partir da data de fabricação.

Apresentações: cartucho com 10 unidades, embalados individualmente, no tamanho de 10cm x 10cm.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	SIMPRO	REG. ANVISA	EAN
PA.0897	Curativo de Alginato de Cálcio 10cmx10cm	Caixa 10 unidades	0307926	80003300014	7896544901797

Missner
Um toque de cuidado

AdPele
Extra Flexível

Fipele

M-TEC
MISSNER TECNOLOGIA DE CURATIVOS

