

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

### Curativos Alginato de Cálcio M-TEC

**Descrição:** Produto correlato médico hospitalar, classe III (conforme classificação da ANVISA). É apresentado na forma de curativos em placa ou tiras, estéril por Irradiação Gama.

**Composição:** Composto por fibras de alginato de sódio e cloreto de cálcio e sódio. Isento de látex.

**Indicação de uso:** o Curativo de Alginato de Cálcio M-Tec é indicado para as seguintes feridas crônicas e agudas de moderadas a alta exsudação: úlceras por pressão, úlceras venosas e arteriais, úlceras diabéticas, feridas de cavidade, lacerações, abrasões cutâneas, locais de enxertos e doadores, feridas cirúrgicas pós-operatórias, queimaduras de espessura superficial e parcial. O Curativo de Alginato de Cálcio M Tec também pode ser usado para controlar sangramentos menores em feridas superficiais.

**Precauções:** Não reutilize o curativo, pois pode comprometer a esterilidade e / ou o desempenho do curativo. Não ingerir e manter afastado de crianças e animais. Para uso sob orientação de um profissional de saúde. Somente para uso externo. Em caso de irritação, descontinue o uso e procure orientação médica.

**Condições de Armazenamento e Conservação:** Manter em local limpo e ao abrigo da luz. Aconselhável manter em temperatura abaixo de 25°C.

**Advertências:** não é indicado para controlar sangramentos intensos. Não use em indivíduos com uma sensibilidade conhecida à alginatos. Não use como implante cirúrgico. Não utilize este curativo sozinho para combater feridas infectadas, ele não possui ação antimicrobiana. Destruir após o uso. Manter em local limpo e ao abrigo da luz. Aconselhável manter em temperatura abaixo de 25°C.

**Validade:** 03 anos a partir da data de fabricação.



## REFERÊNCIAS

Código	Descrição	Apresentação	Referência	ANVISA
PA.0897	Curativo de Alginato de Cálcio 10cm x 10cm	CX c/ 10 unid.	7896544901797	80003300014

