

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

Curativos Alginato de Cálcio e Prata M-TEC

Descrição: Produto correlato médico hospitalar, classe III (conforme classificação da ANVISA). É apresentado na forma de curativos em placa ou tiras, estéril por Irradiação Gama.

Composição: composto por fibras de alginato de cálcio (ácido gulurônico (G) e ácido manurônico (M)) e sódio, polietilenoglicol (PEG), carboximetilcelulose (CMC) e um complexo de prata iônica (carbonato de prata). Isento de látex.

Indicação de uso: O Curativo de Alginato de Cálcio e Prata Missner é indicado para uso nas feridas de moderada a alta exsudação e cavidades com espessuras parciais a profundas:

• feridas pós-operatórias; • feridas por trauma (lesões dérmicas, lesões traumáticas ou incisões); • úlceras nas pernas; • úlceras por pressão; • úlceras diabéticas; • locais de enxertos e doadores; • feridas de cavidade; • queimaduras de espessura superficial e parcial;

O Curativo de Alginato de Cálcio e Prata Missner contém alginato, podendo ajudar a apoiar o controle de sangramento menor em feridas superficiais. Este produto também pode ser usado sob bandagens de compressão. O Curativo de Alginato de Cálcio e Prata Missner pode ser usado no tratamento de feridas infectadas ou não em que haja um risco aumentado de infecção sob a supervisão médica de um profissional de saúde.

O Curativo de Alginato de Cálcio e Prata Missner é indicado apenas para uso externo.

Precauções: Não reutilize o curativo, pois pode comprometer a esterilidade e / ou o desempenho do curativo. Não ingerir e manter afastado de crianças e animais. Para uso sob orientação de um profissional de saúde. Somente para uso externo. Em caso de irritação, descontinue o uso e procure orientação médica

Advertências: Não use em indivíduos com uma sensibilidade conhecida à alginatos. Não use como implante cirúrgico. Produto de uso único. Destruir após o uso. Manter em local limpo e ao abrigo da luz. Aconselhável manter em temperatura abaixo de 25°C.

Validade: 03 anos a partir da data de fabricação.



REFERÊNCIAS

Código	Descrição	Apresentação	Referência	ANVISA
PA.0896	Curativo de Alginato de Cálcio e Prata 10cm x 10cm	CX c/ 10 unid.	7896544901810	80003300015

