

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

FITA ADESIVA AUTOCLAVE MISSNER

Descrição: Fita adesiva com dorso de papel crepado tratado e envernizado. Adesivo de alto desempenho à base de borracha natural e resinas. Possui tinta termo reativa e multiparamétrica. É apresentado na forma de rolo cortado e rebobinado em tubete de papelão, encapado com filme plástico impresso e acondicionado em caixas de papelão.

Composição: A Fita Adesiva Hospitalar é confeccionada com dorso de papel crepado à base de celulose, impregnado com resinas e uma camada de verniz em uma das faces. Na outra face, é aplicado uma camada de adesivo a base de borracha natural, resinas.

Características de uso: Ideal para o fechamento de pacotes que serão esterilizados em autoclave à vapor, funciona como indicadora de esterilização, pois possui tinta termo reativa que, quando submetidas às altas temperaturas, mudam sua coloração de rosa para preto. OBS. 01 hora em temperatura de 120° a 140°C e pressão de 1,5atm.

Precauções: A durabilidade deste produto condiciona a manter em local limpo, seco e ao abrigo da luz. Este produto não deve ser colado sobre a pele. Produto não estéril.

Validade: 03 anos à contar de sua data de fabricação.

Observação: A tonalidade da cor da fita após esterilização com autoclave a vapor não indica o material está esterilizado. Indica que o processo de esterilização obedeceu aos parâmetros de tempo, temperatura e pressão.



REFERÊNCIAS

Código	Descrição	Apresentação	Referência	ANVISA
PA.0816	Fita Adesiva Autoclave Missner 19mm x 30m.	CX 48 unid.	7896544925465	Isento

